

Guide des flèches



Tirer



Pousser



Pointer



Dérouler


Préparation

Avant de commencer

Préparation

1


Avant de suivre les étapes décrites dans ce guide d'utilisation, veuillez lire attentivement les informations et les avertissements figurant au bas de la dernière page. Veuillez noter que les informations fournies dans ce guide ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de santé ni la lecture des instructions d'emploi fournies avec le dispositif de perfusion.

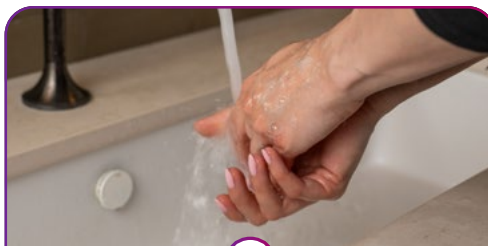

Préparation

2

Lavez-vous les mains avant d'insérer le dispositif de perfusion.

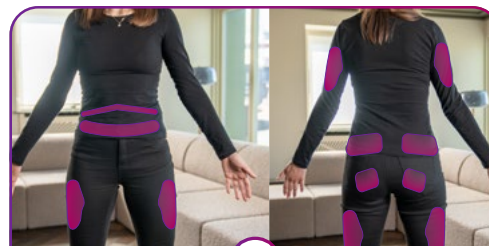

Préparation

3

Choisissez un site d'insertion selon les recommandations de votre professionnel de santé. N'utilisez pas la zone située juste à côté de votre ancien site de perfusion.




Préparation

4

Nettoyez la zone d'insertion avec un désinfectant, selon les instructions de votre professionnel de santé. Assurez-vous que la zone a bien séché à l'air libre avant d'insérer le dispositif de perfusion.

Insertion

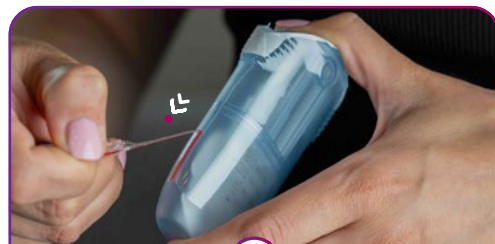

Insertion

5

Tirez sur la bande rouge pour retirer le plastique de scellement.

⚠ Attention

Assurez-vous de la stérilité du dispositif en vérifiant l'intégrité du plastique de scellement. Ne pas utiliser si le dispositif de perfusion est déjà ouvert ou a été endommagé.



Insertion

6

Retirez le papier stérile. Ne touchez pas le ressort à ce stade.

⚠ Attention

Ne pas utiliser si le papier stérile est déchiré.




Insertion

7

Placez les doigts sur les rainures de chaque côté, tournez légèrement et retirez le couvercle avec l'autre main.

⚠ Attention

Veillez à ne pas plier ni toucher l'aiguille d'insertion. Si le dispositif de perfusion n'est pas correctement inséré dans le dispositif d'insertion, l'aiguille pointant droit devant, des douleurs ou des blessures mineures peuvent survenir lors de l'insertion.

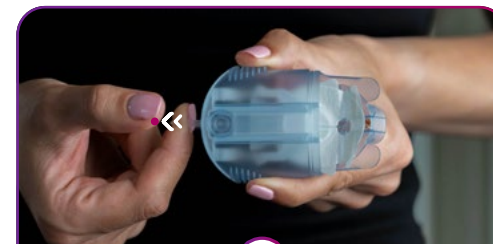

Insertion

8

Placez vos doigts sur les rainures de chaque côté. Tirez doucement sur le ressort jusqu'à entendre un « clic ». Le protecteur d'aiguille se soulèvera ou se détachera. Ne touchez pas et ne pliez pas l'aiguille d'introduction.

Guide des flèches



Tirer



Pousser



Pointer



Dérouler

Insertion



Insertion

9

Si le protecteur d'aiguille n'est pas tombé à l'étape précédente, retirez-le soigneusement avant l'insertion.



Insertion

10


Assurez-vous que le ruban adhésif ne soit pas collé sur l'aiguille d'introduction.



Insertion

11

Vérifiez que la canule souple se trouve sous la pointe de l'aiguille d'introduction. Ne sautez pas cette étape, car elle est essentielle pour garantir une insertion correcte.

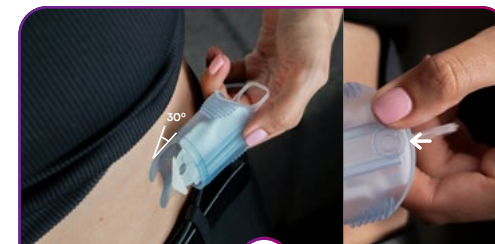

Insertion

12

Saisissez le dispositif d'insertion avec votre index et votre pouce par ses boutons de déverrouillage supérieur et inférieur et positionnez-le avec ses pattes à plat sur la peau pour assurer un angle d'insertion de 30°.

Insertion



Insertion

13

Veillez à maintenir un angle de 30° lors de l'insertion. Pressez doucement sur les boutons de déverrouillage en haut et en bas pour insérer la canule.



Insertion

14

Pour vous assurer que la canule reste en place lors du retrait du dispositif d'insertion et de l'aiguille d'introduction, placez doucement votre doigt sur la fenêtre transparente tout en tirant soigneusement le dispositif d'insertion vers l'arrière de manière rectiligne.



Insertion

15

Maintenez le doigt sur la fenêtre transparente. Retirez délicatement le papier protecteur sous le boîtier de canule.



Insertion

16

Retirez le papier protecteur sous l'extrémité avant.

Guide des flèches



Tirer



Pousser



Pointer



Dérouler

Insertion



Insertion

17


Massez doucement le ruban adhésif sur la peau.



Insertion

18

Remette le couvercle avant de jeter l'inserteur.

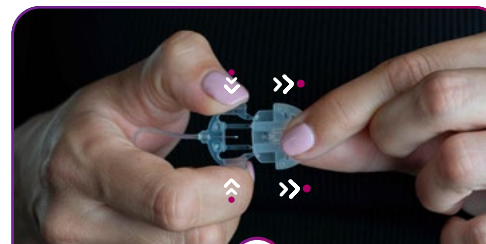

Insertion

19

Retirez le papier de la tubulure et le capuchon protecteur circulaire du connecteur.




Insertion

20

Suivez les instructions d'utilisation du fabricant de votre pompe pour connecter la tubulure du dispositif de perfusion à la pompe.

Insertion

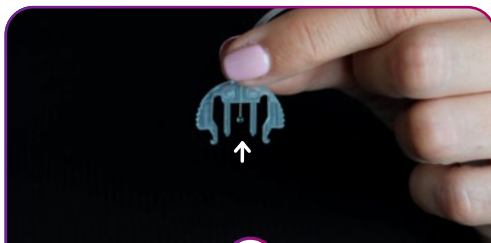


Insertion

21

Tenez le dispositif de perfusion, aiguille pointée vers le bas. Amorcez le dispositif conformément aux instructions du fabricant de la pompe jusqu'à ce que l'insuline sorte de l'aiguille. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de bulles d'air dans la tubulure.

⚠ Attention


Ne remplissez jamais la tubulure lorsque le dispositif de perfusion est connecté à votre corps.

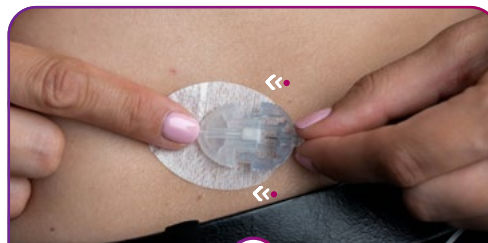

Insertion

22

Après avoir amorcé le dispositif de perfusion, placez un doigt devant le boîtier de canule et insérez l'aiguille du connecteur jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

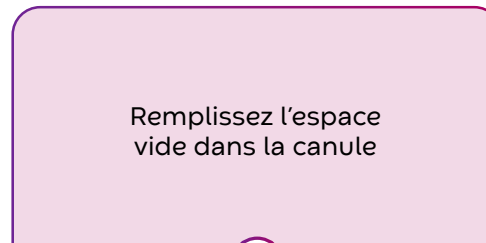

Insertion

23

Remplissez l'espace vide dans la canule

Remplissez l'espace vide dans la canule en suivant les instructions du fabricant de votre pompe.

⚠ Attention

Vérifiez toujours votre glycémie une à trois heures après l'insertion du dispositif de perfusion afin de vous assurer de son bon fonctionnement. Mesurez régulièrement votre glycémie. Discutez-en avec votre professionnel de santé.

Guide des flèches



Tirer



Pousser




Pointer



Dérouler


Déconnexion

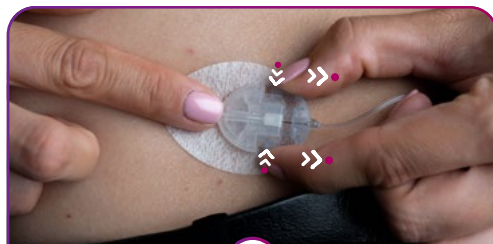

Déconnexion

A

Ce dispositif de perfusion vous permet de le déconnecter temporairement de votre pompe. Placez un doigt juste devant le boîtier de canule et pressez doucement les côtés de l'aiguille de connexion. Retirez l'aiguille de connexion en tirant dessus.

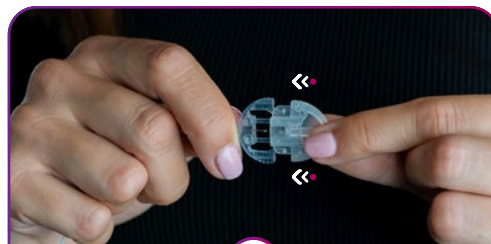

Déconnexion

B

Insérez le capuchon de protection circulaire dans l'aiguille du connecteur jusqu'à entendre un « clic ».



Déconnexion

C

Insérez le couvercle de déconnexion dans le boîtier de canule jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».



Guide des flèches



Tirer



Pousser




Pointer



Dérouler


Reconnexion

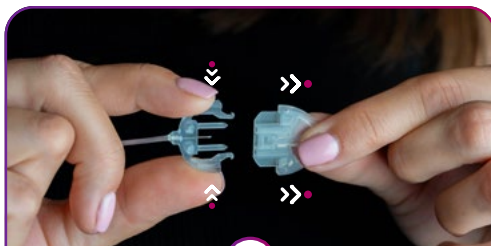

Reconnexion

D

Avant de reconnecter le dispositif de perfusion, assurez-vous que l'adhésif soit toujours bien en place sur la peau. Retirez le capuchon de protection circulaire de l'aiguille de connexion.

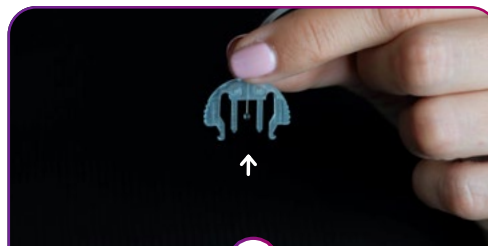


Reconnexion

E

Tenez le dispositif de perfusion, aiguille pointée vers le bas. Amorcez le dispositif conformément aux instructions du fabricant de la pompe jusqu'à ce que l'insuline sorte de l'aiguille. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de bulles d'air dans la tubulure.

⚠ Attention

Ne remplissez jamais la tubulure lorsque le dispositif de perfusion est connecté à votre corps.

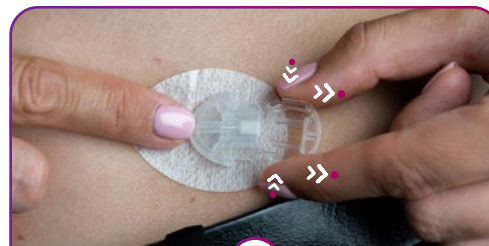

Reconnexion

F

Retirez le couvercle de déconnexion du boîtier de canule.



Reconnexion

G

Placez un doigt devant le boîtier de canule. Enfoncez l'aiguille du connecteur jusqu'à entendre un clic.