

Pfeillegende



Ziehen



Drücken



Zeigen



Drehen


Vorbereitung

Bevor Sie beginnen

Vorbereitung

1


Bevor Sie die in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Schritte ausführen, lesen Sie bitte die Informationen und Disclaimer unten auf der letzten Seite sorgfältig durch. Bitte beachten Sie, dass die Informationen in dieser Anleitung keinen Ersatz für ärztlichen Rat oder das Lesen der dem Infusionsset beiliegenden Produkthanleitung darstellen.

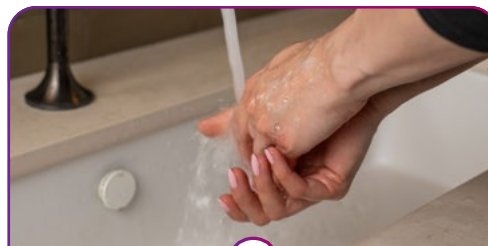

Vorbereitung

2

Waschen Sie Ihre Hände, bevor Sie das Infusionsset einsetzen.

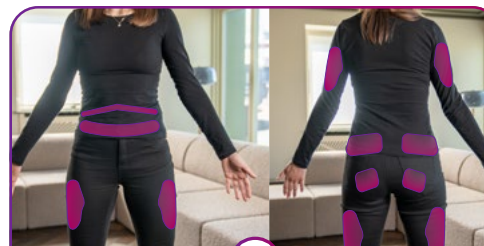

Vorbereitung

3

Wählen Sie die Einstichstelle entsprechend den Empfehlungen Ihres Arztes. Vermeiden Sie dabei Bereiche, die sich direkt neben der vorherigen Infusionsstelle befinden.




Vorbereitung

4

Reinigen Sie die Einstichstelle mit einem Desinfektionsmittel gemäß den Anweisungen Ihres Arztes. Achten Sie darauf, dass der Bereich vollständig luftgetrocknet ist, bevor Sie das Infusionsset einsetzen.

Einsetzen

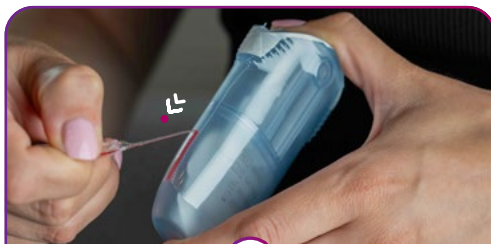

Einsetzen

5

Ziehen Sie am roten Band, um die sterile Plastikversiegelung zu entfernen.

Vorsicht

Stellen Sie die Sterilität sicher, indem Sie prüfen, ob die Sicherheitsversiegelung unbeschädigt ist. Verwenden Sie das Infusionsset nicht, wenn die Verpackung bereits geöffnet oder beschädigt ist.



Einsetzen

6

Ziehen Sie das Sterilpapier ab. Berühren Sie die Feder dabei nicht.

Vorsicht

Verwenden Sie das Infusionsset nicht, wenn das Sterilpapier beschädigt ist.




Einsetzen

7

Greifen Sie die gerillten Fingermulden mit einer Hand, drehen und ziehen Sie die Kappe mit der anderen Hand ab.

Vorsicht

Achten Sie darauf, die Einführnadel nicht zu verbiegen oder zu berühren. Wenn das Infusionsset nicht sicher in der Einführhilfe sitzt und die Nadel nicht gerade nach oben zeigt, kann es beim Einsetzen zu Schmerzen oder leichten Verletzungen kommen.

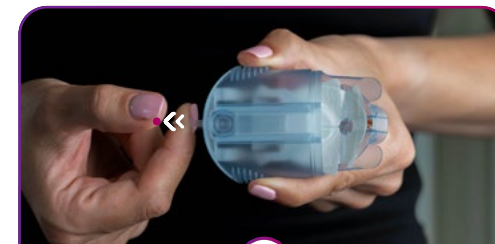

Einsetzen

8

Legen Sie Ihre Finger auf die gerillten Fingermulden auf beiden Seiten. Ziehen Sie die Feder vorsichtig zurück, bis Sie ein „Klick“ hören. Der Nadelschutz hebt sich an oder löst sich ab. Berühren oder verbiegen Sie die Einführnadel nicht.



Pfeillegende



Ziehen



Drücken



Zeigen



Drehen

Einsetzen



Einsetzen

9

Wenn der Nadelschutz im vorherigen Schritt nicht abgefallen ist, entfernen Sie ihn vor dem Einsetzen vorsichtig.



Einsetzen

10


Stellen Sie sicher, dass das Pflaster nicht an der Einführnadel festklebt.



Einsetzen

11

Überprüfen Sie, ob sich die weiche Softkanüle unterhalb der Spitze der Einführnadel befindet. Überspringen Sie diesen Schritt nicht, da er für das korrekte Einsetzen entscheidend ist.

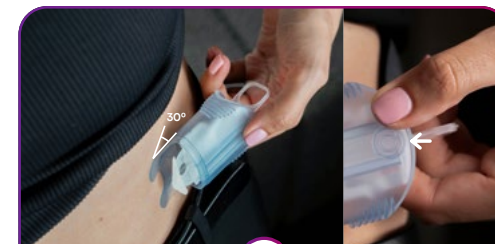

Einsetzen

12

Greifen Sie die Einführhilfe mit Zeigefinger und Daumen an den oberen und unteren Auslöseknöpfen und positionieren Sie sie mit den Schenkeln flach auf der Haut, um einen Einstichwinkel von 30° zu gewährleisten.

Einsetzen



Einsetzen

13

Achten Sie beim Einsetzen auf einen Winkel von 30°. Drücken Sie die oberen und unteren Auslöseknöpfe einmal leicht zusammen, um die Kanüle einzusetzen.



Einsetzen

14

Um sicherzustellen, dass die Kanüle beim Entfernen der Einführhilfe und der Einführnadel an Ort und Stelle bleibt, legen Sie Ihren Finger vorsichtig auf das transparente Fenster und ziehen Sie die Einführhilfe gerade nach hinten.



Einsetzen

15

Belassen Sie den Finger auf dem transparenten Fenster. Entfernen Sie vorsichtig das Schutzpapier unter dem Kanülengehäuse.



Einsetzen

16

Entfernen Sie das Schutzpapier unter der Vorderseite.

Pfeillegende



Ziehen



Drücken



Zeigen



Drehen

Einsetzen



Einsetzen

17


Massieren Sie das Pflaster sanft auf die Haut.



Einsetzen

18

Setzen Sie zur Entsorgung die Kappe wieder auf.

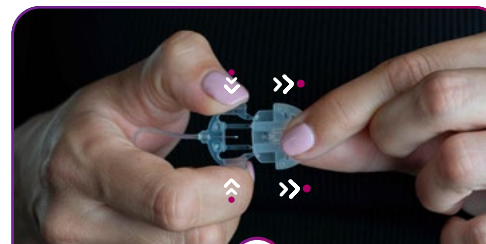

Einsetzen

19

Entfernen Sie das Papier vom Schlauch und die runde Schutzkappe vom Pumpenanschluss.




Einsetzen

20

Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung Ihres Pumpenherstellers, um den Schlauch des Infusionssets an die Pumpe anzuschließen.

Einsetzen

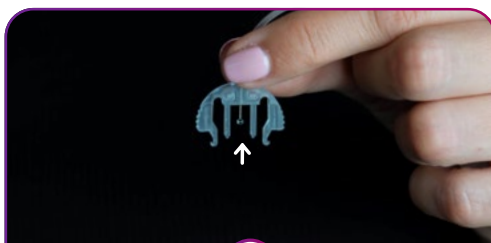


Einsetzen

21

Halten Sie das Infusionsset mit der Nadel nach unten. Füllen Sie das Infusionsset gemäß der Gebrauchsanweisung des Pumpenherstellers, bis Insulin aus der Nadel austritt. Stellen Sie sicher, dass sich keine Luftblasen im Schlauch befinden.

Vorsicht


Füllen Sie den Schlauch niemals, während das Infusionsset mit Ihrem Körper verbunden ist.

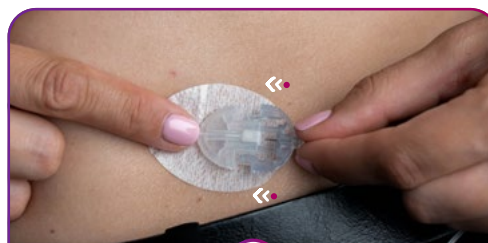

Einsetzen

22

Nachdem Sie das Infusionsset vorbereitet haben, legen Sie einen Finger vor das Kanülengehäuse und führen Sie das Kupplungsteil ein, bis Sie ein „Klick“ hören.

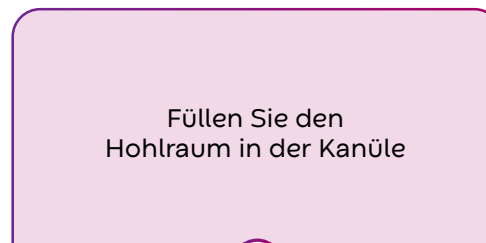

Einsetzen

23

Füllen Sie den Hohlraum in der Kanüle

Füllen Sie den Hohlraum in der Kanüle gemäß den Anweisungen Ihres Pumpenherstellers.

Vorsicht

Überprüfen Sie Ihren Blutzuckerspiegel immer ein bis drei Stunden nach dem Einsetzen, um sicherzustellen, dass das Infusionsset ordnungsgemäß funktioniert. Messen Sie Ihren Blutzucker regelmäßig. Besprechen Sie dies mit Ihrem Arzt.

Pfeillegende



Ziehen



Drücken




Zeigen



Drehen


Trennen

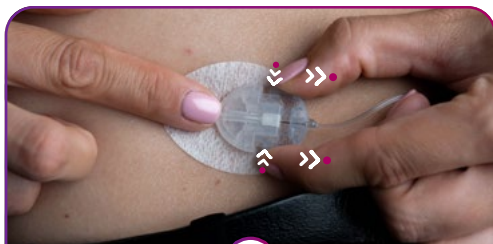

Trennen

A

Mit diesem Infusionsset können Sie Ihre Verbindung zur Pumpe vorübergehend trennen. Halten Sie dazu einen Finger direkt vor das Kanülengehäuse und drücken Sie die Seiten des Kupplungsteils leicht zusammen. Ziehen Sie das Kupplungsteil gerade heraus.

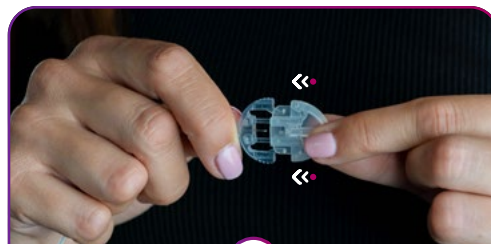

Trennen

B

Verbinden Sie die runde Schutzkappe mit dem Kupplungsteil, bis Sie ein „Klick“ hören.



Trennen

C

Verbinden Sie die Trennabdeckung mit dem Kanülengehäuse, bis Sie ein „Klick“ hören.



Pfeillegende



Ziehen



Drücken




Zeigen



Drehen


Wiederverbinden

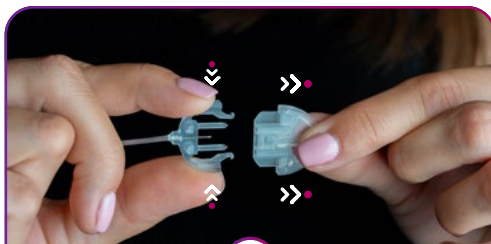

Wiederverbinden

D

Bevor Sie das Infusionsset wieder anschließen, vergewissern Sie sich, dass das Pflaster noch sicher auf der Haut sitzt. Entfernen Sie die runde Schutzkappe vom Kupplungsteil.

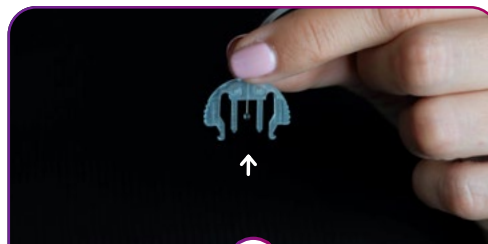


Wiederverbinden

E

Halten Sie das Infusionsset mit der Nadel nach unten. Füllen Sie das Infusionsset gemäß der Gebrauchsanweisung des Pumpenherstellers, bis Insulin aus der Nadel austritt. Stellen Sie sicher, dass sich keine Luftblasen im Schlauch befinden.

⚠ Vorsicht

Füllen Sie den Schlauch niemals, während das Infusionsset mit Ihrem Körper verbunden ist.

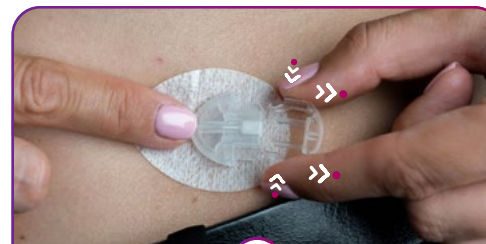

Wiederverbinden

F

Entfernen Sie die Trennabdeckung vom Kanülengehäuse.



Wiederverbinden

G

Legen Sie einen Finger vor das Kanülengehäuse. Führen Sie das Kupplungsteil gerade ein, bis Sie ein „Klick“ hören.