

Guida della freccia



Tirare



Spingere



Punto



Ruotare


Preparazione

Prima di iniziare

Preparazione

1


Prima di seguire le istruzioni descritte in questo manuale, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate in fondo all'ultima pagina. Si prega di notare che le informazioni fornite in questo manuale non sostituiscono il parere di un medico o la lettura delle istruzioni per l'uso (IFU) fornite con il set di infusione.

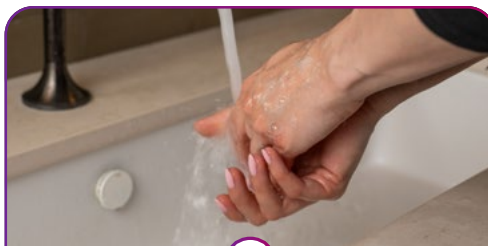

Preparazione

2

Lavarsi le mani prima di inserire il set di infusione.

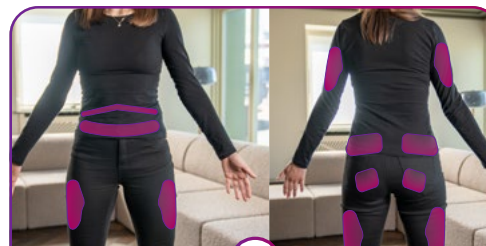

Preparazione

3

Scegliere il sito di inserimento raccomandato dal medico. Non utilizzare un'area adiacente al sito di infusione precedente.




Preparazione

4

Pulire la zona di inserimento con un disinfettante, come indicato dal medico. Assicurarsi che la zona sia asciutta all'aria prima di inserire il set di infusione.

Inserimento

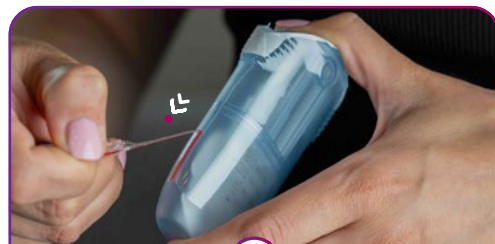

Inserimento

5

Tirare il nastro rosso per rimuovere il sigillo di plastica sterile.

⚠ Attenzione

Assicurare la sterilità verificando che il sigillo di sicurezza non sia danneggiato. Non utilizzare se il set di infusione è già aperto o danneggiato.



Inserimento

6

Togliere la carta sterile. Non toccare la molla in questa fase.

⚠ Attenzione

Non utilizzare se la carta sterile è rotta.




Inserimento

7

Tenere le scanalature con una mano, ruotare leggermente e tirare via il coperchio con l'altra.

⚠ Attenzione

Fare attenzione a non piegare o toccare l'ago introduttore. Se il set di infusione non è inserito saldamente nel dispositivo di inserimento con l'ago rivolto dritto in avanti, durante l'inserimento potrebbero verificarsi dolore o lievi lesioni.

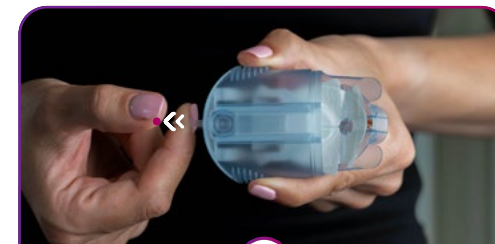

Inserimento

8

Posizionare le dita sulle rientranze sagomate presenti su ciascun lato. Tirare delicatamente la molla fino a sentire un "clic". La protezione dell'ago si solleverà o si staccherà. Non toccare o piegare l'ago introduttore.

Guida della freccia



Tirare



Spingere



Punto



Ruotare

Inserimento



Inserimento

9

Se la protezione dell'ago non si è staccata nel passaggio precedente, rimuoverla con cautela prima dell'inserimento.



Inserimento

10


Assicurarsi che il nastro non sia attaccato all'ago introduttore.



Inserimento

11

Verificare che la cannula morbida si trovi sotto la punta dell'ago introduttore. Non saltare questo passaggio, poiché è fondamentale per garantire un inserimento corretto.

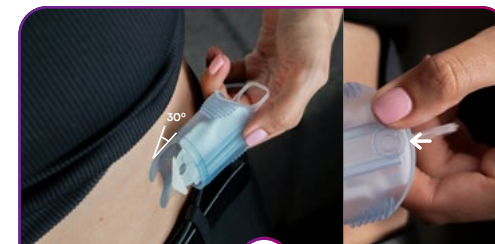

Inserimento

12

Afferrare il dispositivo di inserimento con l'indice e il pollice dai pulsanti di rilascio superiore e inferiore e posizionarlo con le gambe piatte sulla pelle per garantire un angolo di inserimento di 30°.


Inserimento



Inserimento

13

Assicurarsi di mantenere un angolo di 30° durante l'inserimento. Premere delicatamente i pulsanti di rilascio superiore e inferiore una sola volta per inserire la cannula.

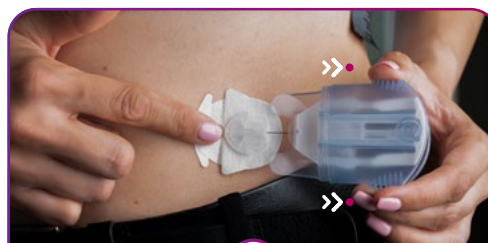

Inserimento

14

Per assicurarsi che la cannula rimanga in posizione quando si rimuovono il dispositivo di inserimento e l'ago introduttore, appoggiare delicatamente un dito sulla finestra trasparente mentre si tira con cautela indietro il dispositivo di inserimento.



Inserimento

15

Tenere il dito sulla finestrella trasparente. Rimuovere con cautela la carta protettiva sotto l'alloggiamento della cannula.



Inserimento

16

Rimuovere la carta protettiva sotto la parte anteriore.

Guida della freccia



Tirare



Spingere



Punto



Ruotare

Inserimento



Inserimento

17


Massaggiare delicatamente il cerotto adesivo sulla pelle.



Inserimento

18

Richiudere il coperchio per lo smaltimento.

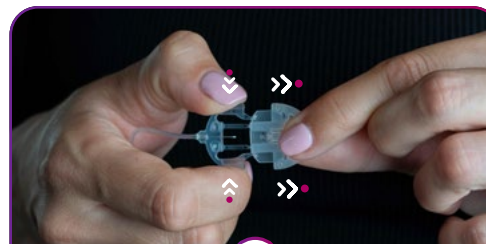

Inserimento

19

Rimuovere la carta dal tubo e il cappuccio protettivo circolare dal connettore.




Inserimento

20

Per collegare il tubo del set di infusione alla pompa, seguire le istruzioni per l'uso fornite dal produttore della pompa.

Inserimento

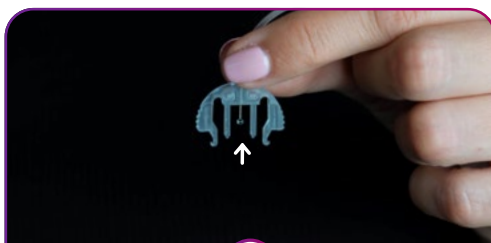


Inserimento

21

Tenere il set di infusione con l'ago rivolto verso il basso. Caricare il set di infusione secondo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore della pompa fino a quando l'insulina non fuoriesce dall'ago. Assicurarsi che non vi siano bolle d'aria nel tubo.

Attenzione


Non riempire mai il tubo mentre il set di infusione è collegato al corpo.

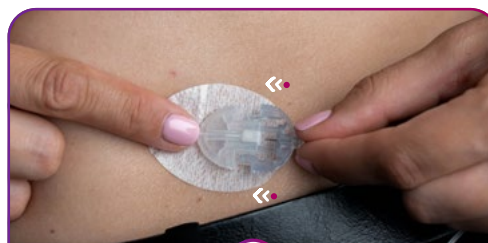

Inserimento

22

Dopo aver caricato il set di infusione, posizionare un dito davanti all'alloggiamento della cannula e inserire l'ago connettore fino a sentire un "clic".

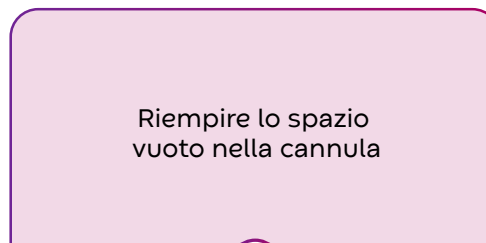

Inserimento

23

Riempire lo spazio vuoto nella cannula

Riempire lo spazio vuoto nella cannula seguendo le istruzioni fornite dal produttore della pompa.

Attenzione

Controllare sempre la glicemia da una a tre ore dopo l'inserimento per assicurarsi che il set di infusione funzioni correttamente. Misurare la glicemia regolarmente. Discutere di questo aspetto con il proprio medico.

Guida della freccia



Tirare



Spingere




Punto



Ruotare


Disconnessione

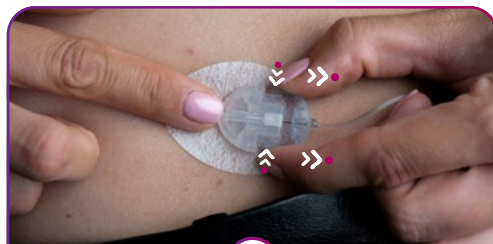

Disconnessione

A

Questo set di infusione consente di scollegarlo temporaneamente dalla pompa. Posizionare un dito appena davanti all'alloggiamento della cannula e premere delicatamente i lati dell'ago connettore. Estrarre l'ago connettore in linea retta.

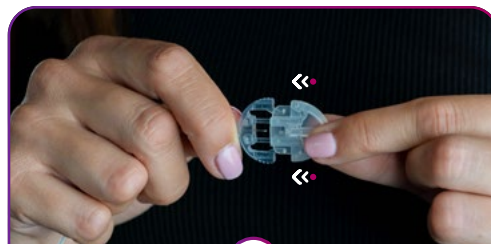

Disconnessione

B

Inserire il cappuccio protettivo circolare nell'ago del connettore fino a sentire un "clic".



Disconnessione

C

Inserire il cappuccio di disconnessione nell'alloggiamento della cannula finché non si sente un "clic".

Guida della freccia



Tirare



Spingere




Punto



Ruotare


Riconnessione

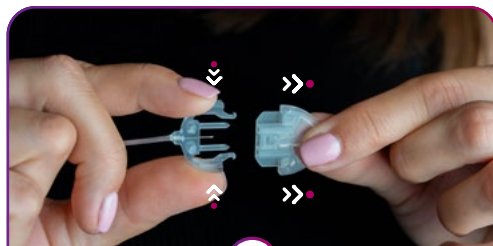

Riconnessione

D

Prima di ricollegare il set di infusione, assicurarsi che l'adesivo sia ancora ben aderente alla pelle. Rimuovere il cappuccio protettivo circolare dall'ago connettore.

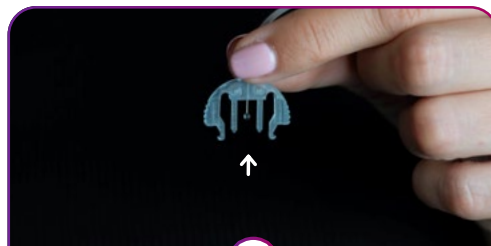


Riconnessione

E

Tenere il set di infusione con l'ago rivolto verso il basso. Caricare il set di infusione secondo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore della pompa fino a quando l'insulina non fuoriesce dall'ago. Assicurarsi che non vi siano bolle d'aria nel tubo.

⚠ Attenzione

Non riempire mai il tubo mentre il set di infusione è collegato al corpo.

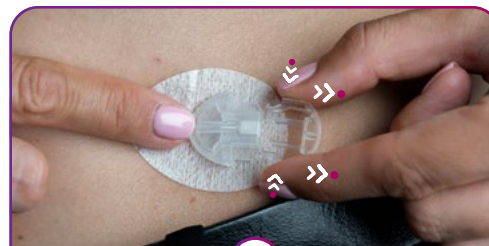

Riconnessione

F

Rimuovere il cappuccio di scollegamento dall'alloggiamento della cannula.



Riconnessione

G

Posizionare un dito davanti all'alloggiamento della cannula. Spingere l'ago connettore dritto fino a sentire un "clic".