



Guía de flechas



Tirar



Empujar



Indicar



Girar

Preparación

Antes de empezar

Preparación

1

Antes de seguir los pasos descritos en esta guía, lea atentamente la información y las advertencias que se encuentran al final de la última página. Tenga en cuenta que la información proporcionada en esta guía no sustituye el consejo médico profesional ni la lectura de las instrucciones de uso (IFU) que vienen con el set de infusión.



Preparación

2

Lávese las manos antes de insertar el set de infusión.



Preparación

3

Elija el punto de inserción según las recomendaciones de su profesional de la salud. No utilice un área inmediatamente adyacente al punto de infusión anterior.



Preparación

4

Limpie la zona de inserción con un desinfectante según las indicaciones de su profesional sanitario. Asegúrese de que la zona se haya secado al aire antes de insertar el set de infusión.

Inserción



Inserción

5

Tire de la cinta roja para retirar el sello de plástico estéril.

⚠ Precaución

Asegúrese de la esterilidad comprobando que el sello de seguridad esté intacto. No lo utilice si el set de infusión ya está abierto o dañado.



Inserción

6

Retire el papel estéril. No toque el resorte en este momento.

⚠ Precaución

No utilizar si el papel estéril está roto.



Inserción

7

Con una mano, sujete las hendiduras marcadas y, con la otra, gire suavemente y retire la tapa.

⚠ Precaución

Tenga cuidado de no doblar ni tocar la aguja introductora. Si el set de infusión no está correctamente colocado en el dispositivo de inserción, con la aguja orientada directamente hacia adelante, podría causar dolor o lesiones leves durante la inserción.



Inserción

8

Coloque los dedos sobre las marcas a cada lado. Tire suavemente del resorte hasta oír un "clic". El protector de la aguja se levantará o se desprenderá. No toque ni doble la aguja introductora.



Guía de flechas



Tirar



Empujar



Indicar



Girar

Inserción



Inserción

9

Si el protector de la aguja no se ha caído en el paso anterior, retírelo con cuidado antes de insertarlo.



Inserción

10


Asegúrese de que la cinta no esté atascada en la aguja introductora.



Inserción

11

Compruebe que la cánula blanda esté por debajo de la punta de la aguja introductora. No omita este paso, ya que es fundamental para asegurar una inserción correcta.

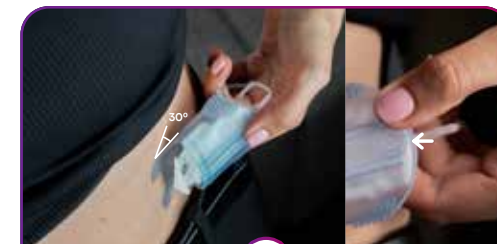

Inserción

12

Sujete el dispositivo de inserción con el dedo índice y el pulgar por los botones de liberación superior e inferior, y colóquelo con las patas planas sobre la piel para asegurar un ángulo de inserción de 30°.

Inserción



Inserción

13

Asegúrese de mantener un ángulo de 30° al insertar la cánula blanda. Presione suavemente los botones de liberación superior e inferior para insertarla.



Inserción

14

Para asegurarse de que la cánula blanda permanezca en su lugar al retirar el dispositivo de inserción y la aguja introductora, coloque el dedo suavemente sobre la ventana transparente mientras tira con cuidado del dispositivo de inserción hacia atrás.



Inserción

15

Mantenga el dedo sobre la ventana transparente. Retire con cuidado el papel protector situado debajo de la carcasa de la cánula.



Inserción

16

Retire el papel protector situado debajo del extremo frontal.



Guía de flechas



Tirar



Empujar



Indicar



Girar

Inserción



Inserción

17

Masajee suavemente el apósito sobre la piel.



Inserción

18

Vuelva a colocar la tapa para desecharlo.



Inserción

19

Retire el papel del tubo y la tapa protectora circular del conector.




Inserción

20

Siga las instrucciones de uso del fabricante de la bomba para conectar el tubo del set de infusión a la bomba.

Inserción

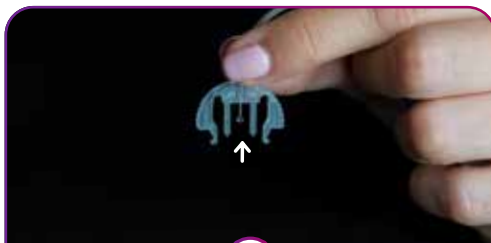

Inserción

21

Sujete el set de infusión con la aguja hacia abajo. Purgue el set de infusión según las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la bomba hasta que la insulina salga por la aguja. Asegúrese de que no haya burbujas de aire en el tubo.

⚠ Precaución


Nunca llene el tubo mientras el set de infusión esté conectado a su cuerpo.



Inserción

22

Después de preparar el set de infusión, coloque un dedo delante de la carcasa de la cánula e inserte el conector hasta que escuche un "clic".

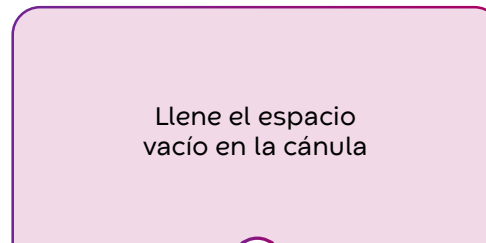

Inserción

23

Llene el espacio vacío en la cánula

Llene el espacio vacío en la cánula siguiendo las instrucciones del fabricante de la bomba.

⚠ Precaución

Revise siempre su nivel de glucosa en sangre entre 1 y 3 horas después de la inserción para garantizar que el set de infusión funcione correctamente. Mida su glucosa regularmente y consulte con su profesional de salud.

Guía de flechas



Tirar



Empujar



Indicar



Girar


Desconectando



Desconectando

A

Este set de infusión le permite desconectarse temporalmente de la bomba. Coloque un dedo justo delante de la carcasa de la cánula, presione suavemente los lados del conector y tire hacia fuera.

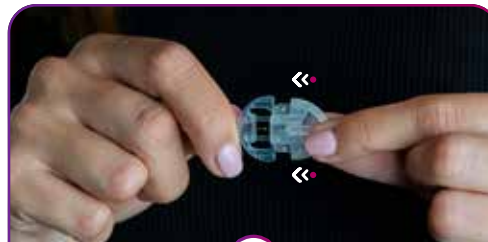

Desconectando

B

Inserte la tapa protectora circular en el conector hasta escuchar un "clic".



Desconectando

C

Inserte la tapa protectora de desconexión en la carcasa de la cánula hasta que escuche un "clic".

Guía de flechas



Tirar



Empujar




Indicar



Girar


Reconectando

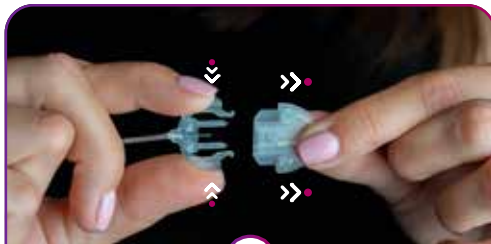

Reconectando

D

Antes de reconectar el set de infusión, asegúrese de que el adhesivo siga firmemente adherido a la piel. Retire la tapa protectora circular del conector.

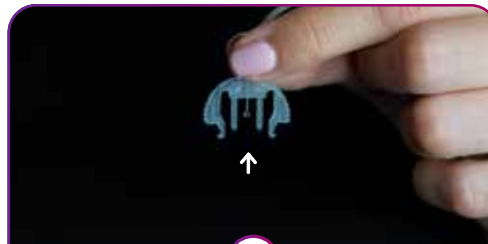

Reconectando

E

Sujete el set de infusión con la aguja hacia abajo. Prepare el set de infusión según las instrucciones de uso del fabricante de la bomba hasta que la insulina salga por la aguja. Asegúrese de que no haya burbujas de aire en el tubo.

⚠ Precaución

Nunca llene el tubo mientras el set de infusión esté conectado a su cuerpo.



Reconectando

F

Retire la tapa de desconexión de la carcasa de la cánula.



Reconectando

G

Coloque un dedo delante de la carcasa de la cánula. Empuje el conector hacia adentro hasta que oiga un "clic".