



Guide des flèches



Tirer



Pousser



Pointer



Dérourer

Préparation


Avant de commencer

Préparation

1

Avant de suivre les étapes décrites dans ce guide d'utilisation, veuillez lire attentivement les informations et les avertissements figurant au bas de la dernière page. Veuillez noter que les informations fournies dans ce guide ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de santé ni la lecture des instructions d'emploi fournies avec le dispositif de perfusion.


Les étapes d'utilisation de nos dispositifs de perfusion comfort™ et comfort™ short sont identiques.

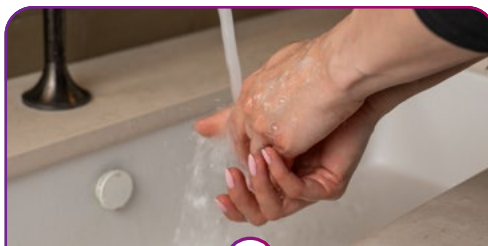

Préparation

2

Lavez-vous les mains avant d'insérer le dispositif de perfusion.

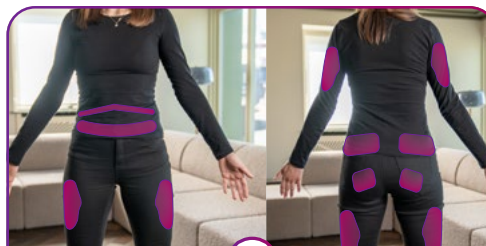

Préparation

3

Choisissez un site d'insertion selon les recommandations de votre professionnel de santé. N'utilisez pas la zone située juste à côté de votre ancien site de perfusion.



Préparation

4

Nettoyez la zone d'insertion avec un désinfectant, selon les instructions de votre professionnel de santé. Assurez-vous que la zone a bien séché à l'air libre avant d'insérer le dispositif de perfusion.

Insertion



Insertion

5

Retirez le dispositif de perfusion de son emballage stérile.

Attention


Assurez-vous de la stérilité du dispositif en vérifiant l'intégrité de l'emballage. Ne pas utiliser si le dispositif de perfusion est déjà ouvert ou endommagé.



Insertion

6


Retirez délicatement le papier protecteur du ruban adhésif.

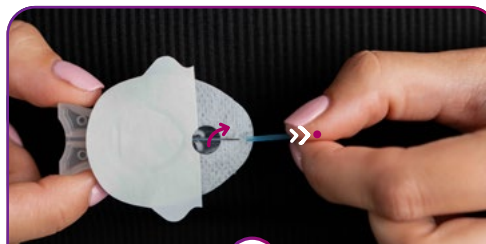

Insertion

7

Tournez et tirez doucement pour retirer le capuchon de l'aiguille.

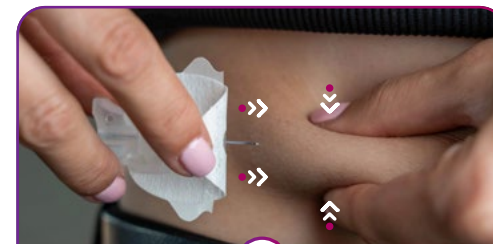

Insertion

8

Pincez la peau au point d'insertion d'une main. De l'autre, insérez le dispositif de perfusion à un angle de 20 à 45 degrés.

Guide des flèches



Tirer



Pousser



Pointer



Dérouler


Insertion



Insertion

9

Massez doucement la partie avant du ruban adhésif sur la peau.

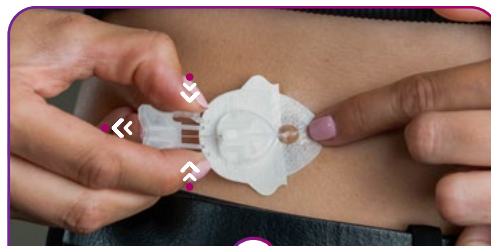

Insertion

10

Placez un doigt devant le boîtier de canule et retirez délicatement l'aiguille d'introduction en appuyant sur les poignées situées sur les prises situées sur le côté de l'aiguille et en la tirant délicatement d'un mouvement rectiligne.



Insertion

11

Retirez délicatement le papier de protection du ruban adhésif. Évitez de toucher le ruban adhésif.



Insertion

12

Massez doucement le ruban adhésif sur la peau.

Insertion



Insertion

13


Retirez le papier de la tubulure et le capuchon protecteur circulaire de l'aiguille du connecteur de la tubulure.



Insertion

14

Suivez les instructions d'utilisation du fabricant de votre pompe pour connecter la tubulure du dispositif de perfusion à la pompe.

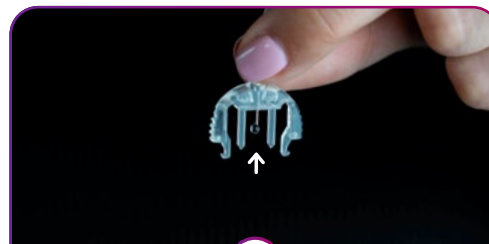

Insertion

15

Tenez le dispositif de perfusion aiguille pointée vers le bas. Amorcez le dispositif conformément aux instructions du fabricant de la pompe jusqu'à ce que de l'insuline sorte de l'aiguille. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de bulles d'air dans la tubulure.

Attention

Ne remplissez jamais la tubulure lorsque le dispositif de perfusion est connecté à votre corps.



Insertion

16

Placez un doigt à l'avant du boîtier de canule et enfoncez l'aiguille du connecteur d'un mouvement rectiligne jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».



Guide des flèches



Tirer



Pousser



Pointer



Dérouler

Insertion

Remplissez l'espace
vide dans la canule

Insertion

17

Remplissez l'espace vide dans la canule en suivant les instructions du fabricant de votre pompe.

⚠ Attention

Vérifiez toujours votre glycémie une à trois heures après l'insertion du dispositif de perfusion afin de vous assurer de son bon fonctionnement. Mesurez régulièrement votre glycémie. Discutez-en avec votre professionnel de santé.


Déconnexion



Déconnexion

A

Ce dispositif de perfusion vous permet une déconnexion temporaire de votre pompe. Placez un doigt juste devant le boîtier de la canule et pressez doucement les côtés de l'aiguille du connecteur. Retirez l'aiguille du connecteur en tirant dessus d'un mouvement rectiligne.

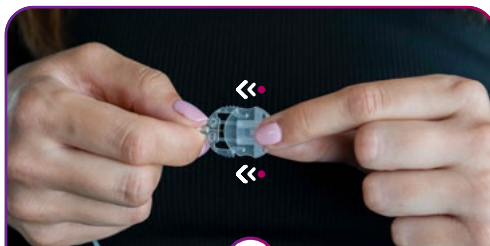

Déconnexion

B

Connectez le capuchon protecteur circulaire à l'aiguille du connecteur de la tubulure.



Déconnexion

C

Connectez le couvercle de déconnexion au boîtier de canule.

Guide des flèches



Tirer



Pousser




Pointer



Dérouler


Reconnexion

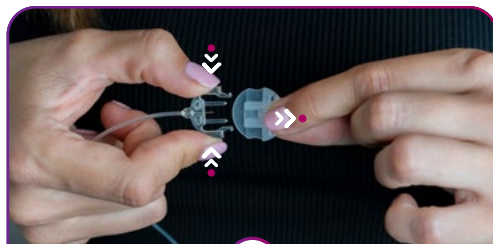

Reconnexion

D

Avant de reconnecter le dispositif de perfusion, assurez-vous que l'adhésif soit toujours bien en place sur la peau. Retirez le capuchon protecteur circulaire de l'aiguille du connecteur de la tubulure.

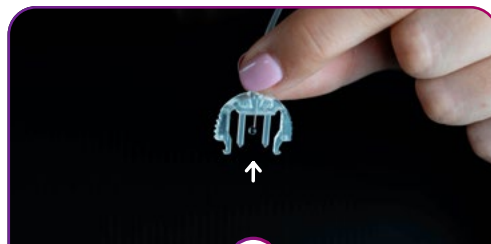

Reconnexion

E

Tenez le dispositif de perfusion aiguille pointée vers le bas. Amorcez le dispositif conformément aux instructions du fabricant de la pompe jusqu'à ce que de l'insuline sorte de l'aiguille. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de bulles d'air dans la tubulure.

⚠ Attention

Ne remplissez jamais la tubulure lorsque le dispositif de perfusion est connecté à votre corps.



Reconnexion

F

Retirez le couvercle de déconnexion du boîtier de canule.



Reconnexion

G

Placez un doigt à l'avant du boîtier de canule et enfoncez l'aiguille du connecteur d'un mouvement rectiligne jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».