



Pfeillegende



Ziehen



Drücken



Zeigen



Drehen

Vorbereitung


Bevor Sie beginnen

Vorbereitung

1

Bevor Sie die in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Schritte ausführen, lesen Sie bitte die Informationen und Disclaimer unten auf der letzten Seite sorgfältig durch. Bitte beachten Sie, dass die Informationen in dieser Anleitung keinen Ersatz für ärztlichen Rat oder das Lesen der dem Infusionsset beiliegenden Produkthanleitung darstellen.


Die Benutzerschritte für unsere comfort™- und comfort™ short -Infusionssets sind identisch.

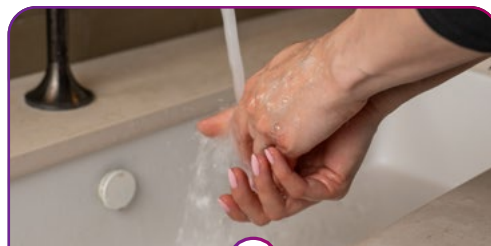

Vorbereitung

2

Waschen Sie Ihre Hände, bevor Sie das Infusionsset einsetzen.

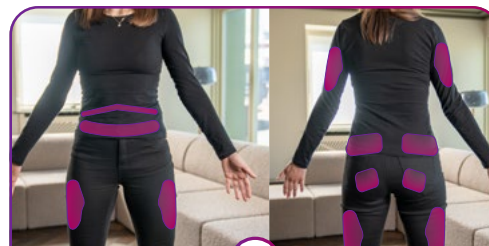

Vorbereitung

3

Wählen Sie die Einstichstelle entsprechend den Empfehlungen Ihres Arztes. Vermeiden Sie dabei Bereiche, die sich direkt neben der vorherigen Infusionsstelle befinden.



Vorbereitung

4

Reinigen Sie die Einstichstelle mit einem Desinfektionsmittel gemäß den Anweisungen Ihres Arztes. Achten Sie darauf, dass der Bereich vollständig luftgetrocknet ist, bevor Sie das Infusionsset einsetzen.

Einsetzen



Einsetzen

5

Nehmen Sie das Infusionsset aus der sterilen Verpackung.

⚠ Vorsicht


Stellen Sie die Sterilität sicher, indem Sie die Verpackung auf Unversehrtheit prüfen. Verwenden Sie das Infusionsset nicht, wenn die Verpackung bereits geöffnet oder beschädigt ist.



Einsetzen

6


Ziehen Sie das vordere Schutzpapier vorsichtig vom Pflaster ab.

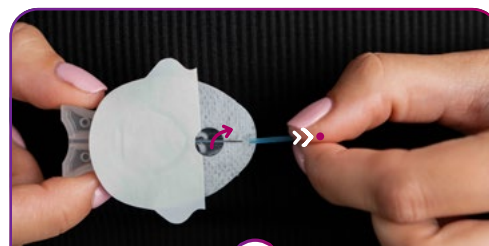

Einsetzen

7

Drehen und ziehen Sie vorsichtig, um den Nadelschutz von der Nadel zu entfernen.

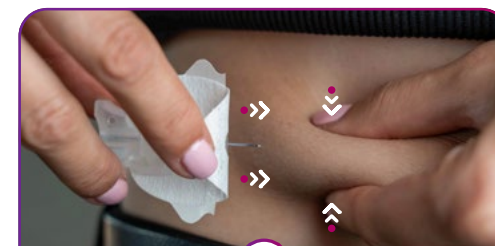

Einsetzen

8

Drücken Sie mit einer Hand die Haut an der Einstichstelle zusammen. Führen Sie mit der anderen Hand das Infusionsset in einem Winkel von 20–45 Grad ein.



Pfeillegende



Ziehen



Drücken



Zeigen



Drehen


Einsetzen



Einsetzen

9

Massieren Sie vorsichtig den vorderen Teil des Pflasters auf die Haut.

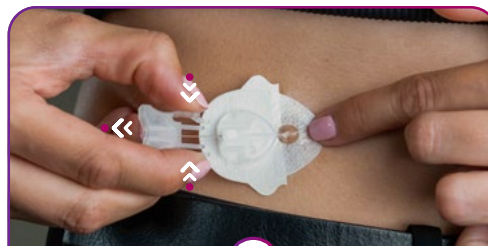

Einsetzen

10

Legen Sie einen Finger vor das Kanülengehäuse und entfernen Sie die Einführnadel vorsichtig, indem Sie auf die Griffe an der Seite der Einführnadel drücken und sie vorsichtig gerade herausziehen.



Einsetzen

11

Entfernen Sie vorsichtig das hintere Schutzpapier des Pflasters. Vermeiden Sie es, das Pflaster dabei zu berühren.



Einsetzen

12

Massieren Sie vorsichtig das Pflaster auf die Haut.

Einsetzen



Einsetzen

13


Entfernen Sie das Papier vom Schlauch und die runde Schutzkappe vom Kupplungsteil.



Einsetzen

14

Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung Ihres Pumpenherstellers, um den Schlauch des Infusionssets an die Pumpe anzuschließen.

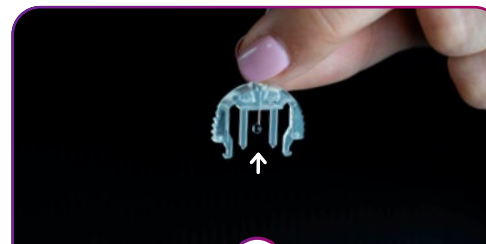

Einsetzen

15

Halten Sie das Infusionsset mit der Nadel nach unten. Füllen Sie das Infusionsset gemäß den Anweisungen des Pumpenherstellers, bis Insulin aus der Nadel austritt. Stellen Sie sicher, dass sich keine Luftblasen im Schlauch befinden.

⚠ Vorsicht

Füllen Sie den Schlauch niemals, während das Infusionsset mit Ihrem Körper verbunden ist.



Einsetzen

16

Legen Sie einen Finger vor das Kanülengehäuse und führen Sie das Kupplungsteil gerade ein, bis Sie ein „Klick“ hören.

Pfeillegende



Ziehen



Drücken



Zeigen



Drehen

Einsetzen

Füllen Sie den Hohlraum in der Kanüle

Einsetzen

17

Füllen Sie den Hohlraum in der Kanüle gemäß den Anweisungen Ihres Pumpenherstellers.

Vorsicht

Überprüfen Sie Ihren Blutzuckerwert immer ein bis drei Stunden nach dem Einsetzen, um sicherzustellen, dass das Infusionsset ordnungsgemäß funktioniert. Messen Sie Ihren Blutzucker regelmäßig. Besprechen Sie dies mit Ihrem Arzt.


Trennen



Trennen

A

Mit diesem Infusionsset können Sie die Verbindung zur Pumpe vorübergehend trennen. Halten Sie dazu einen Finger direkt vor das Kanülengehäuse und drücken Sie die Seiten des Kupplungsteils leicht zusammen. Ziehen Sie das Kupplungsteil gerade heraus.

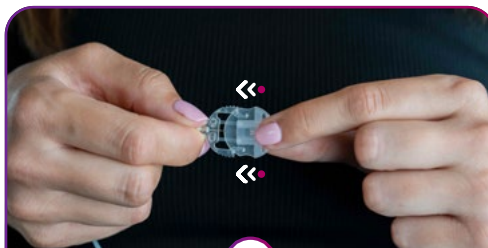

Trennen

B

Verbinden Sie die runde Schutzkappe mit dem Kupplungsteil.



Trennen

C

Verbinden Sie die Trennabdeckung mit dem Kanülengehäuse.



Pfeillegende



Ziehen



Drücken




Zeigen



Drehen


Wiederverbinden

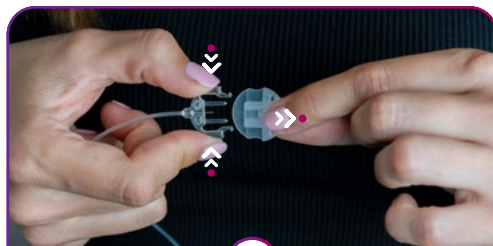

Wiederverbinden

D

Bevor Sie das Infusionsset wieder anschließen, vergewissern Sie sich, dass das Pflaster noch sicher auf der Haut klebt. Entfernen Sie die runde Schutzkappe vom Kupplungsteil.

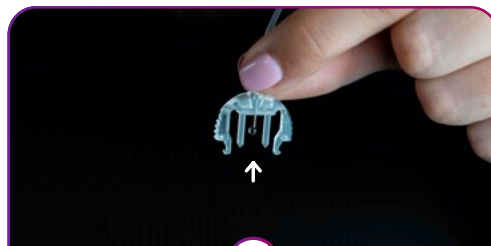

Wiederverbinden

E

Halten Sie das Infusionsset mit der Nadel nach unten. Füllen Sie das Infusionsset gemäß den Anweisungen des Pumpenherstellers, bis Insulin aus der Nadel austritt. Stellen Sie sicher, dass sich keine Luftblasen im Schlauch befinden.

⚠ Vorsicht

Füllen Sie den Schlauch niemals, während das Infusionsset mit Ihrem Körper verbunden ist.



Wiederverbinden

F

Entfernen Sie die Trennabdeckung vom Kanülengehäuse.



Wiederverbinden

G

Legen Sie einen Finger vor das Kanülengehäuse und führen Sie das Kupplungsteil gerade ein, bis Sie ein „Klick“ hören.