



Guida della freccia



Tirare



Spingere



Punto



Ruotare

Preparazione


Prima di iniziare

Preparazione

1

Prima di seguire le istruzioni descritte in questo manuale, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate in fondo all'ultima pagina. Si prega di notare che le informazioni fornite in questo manuale non sostituiscono il parere di un medico o la lettura delle istruzioni per l'uso (IFU) fornite con il set di infusione.


Le fasi di utilizzo dei nostri set per infusione comfort™ e comfort™ short sono identiche.

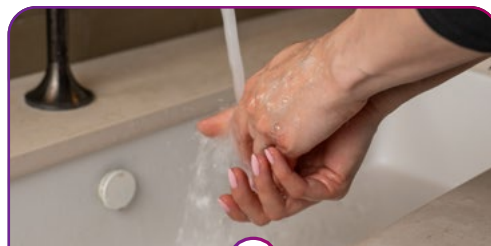

Preparazione

2

Lavarsi le mani prima di inserire il set di infusione.

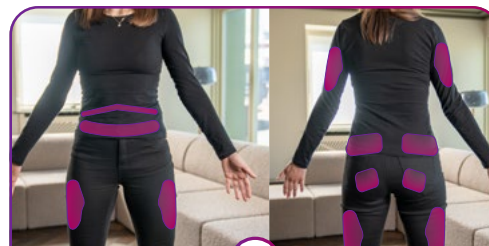

Preparazione

3

Scegliere il sito di inserimento raccomandato dal medico. Non utilizzare un'area adiacente al sito di infusione precedente.



Preparazione

4

Pulire la zona di inserimento con un disinfettante, come indicato dal medico. Assicurarsi che la zona sia asciutta all'aria prima di inserire il set di infusione.

Inserimento



Inserimento

5

Estrarre il set per infusione dalla confezione sterile.

⚠ Attenzione


Assicurare la sterilità controllando che la confezione sia integra. Non utilizzare se il set di infusione è già aperto o danneggiato.



Inserimento

6


Rimuovere delicatamente la carta anteriore dal nastro adesivo.

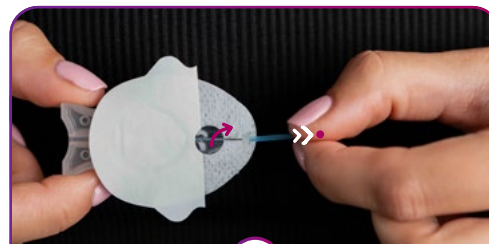

Inserimento

7

Ruotare e tirare delicatamente per rimuovere la protezione dell'ago dall'ago.

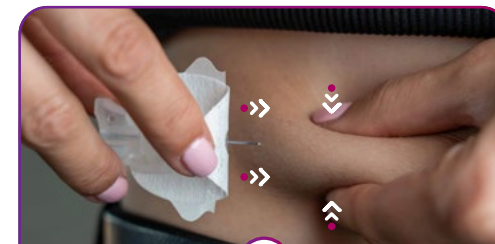

Inserimento

8

Con una mano, pizzicare la pelle nel sito di inserimento. Con l'altra mano, inserire il set di infusione con un'angolazione di 20-45 gradi.



convatec

Infusion Care

Set di infusione comfort™ e comfort™ short

Guida per l'utente

Guida della freccia



Tirare



Spingere



Punto



Ruotare


Inserimento



Inserimento

9

Massaggiare delicatamente la parte anteriore del nastro adesivo sulla pelle.

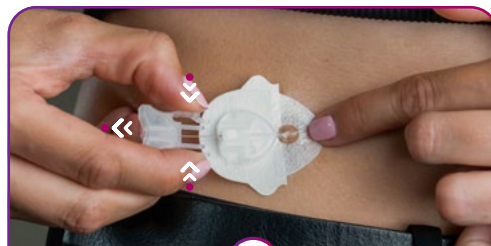

Inserimento

10

Posizionare un dito davanti all'alloggiamento della cannula e rimuovere delicatamente l'ago introduttore premendo sulle impugnature laterali dell'ago introduttore e tirandolo delicatamente verso l'esterno.



Inserimento

11

Rimuovere con cautela la carta posteriore dal nastro adesivo. Evitare di toccare il nastro adesivo.



Inserimento

12

Massaggiare delicatamente il nastro adesivo sulla pelle.

Inserimento



Inserimento

13


Rimuovere la carta dal tubo e il cappuccio protettivo circolare dall'ago connettore.



Inserimento

14

Per collegare il tubo del set di infusione alla pompa, seguire le istruzioni per l'uso fornite dal produttore della pompa.

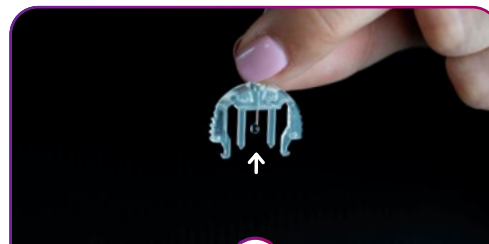

Inserimento

15

Tenere il set di infusione con l'ago rivolto verso il basso. Caricare il set di infusione secondo le istruzioni fornite dal produttore della pompa fino a quando l'insulina non fuoriesce dall'ago. Assicurarsi che non vi siano bolle d'aria nel tubo.

Attenzione

Non riempire mai il tubo mentre il set di infusione è collegato al corpo.



Inserimento

16

Posizionare un dito davanti all'alloggiamento della cannula e spingere l'ago connettore dritto fino a sentire un "clic".



Guida della freccia



Tirare



Spingere



Punto



Ruotare

Inserimento

Riempire lo spazio vuoto nella cannula

Inserimento

17

Riempire lo spazio vuoto nella cannula seguendo le istruzioni fornite dal produttore della pompa.

⚠ Attenzione

Controllare sempre la glicemia da una a tre ore dopo l'inserimento per assicurarsi che il set di infusione funzioni correttamente. Misurare la glicemia regolarmente. Discutere di questo aspetto con il proprio medico.


Disconnessione



Disconnessione

A

Questo set di infusione consente di scollegarlo temporaneamente dalla pompa. Posizionare un dito appena davanti all'alloggiamento della cannula e premere delicatamente i lati dell'ago connettore. Estrarre l'ago connettore in linea retta.

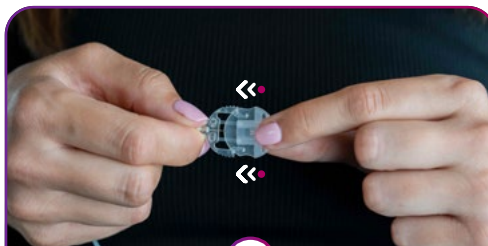

Disconnessione

B

Collegare il cappuccio protettivo circolare all'ago connettore.



Disconnessione

C

Collegare il cappuccio di scollegamento all'alloggiamento della cannula.



Guida della freccia



Tirare



Spingere




Punto



Ruotare


Riconnessione

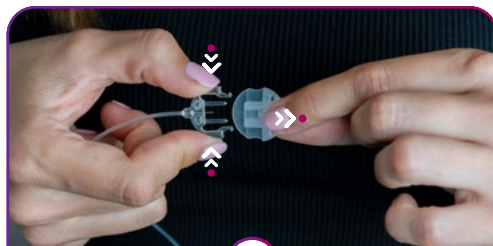

Riconnessione

D

Prima di ricollegare il set di infusione, assicurarsi che l'adesivo sia ancora ben aderente alla pelle. Rimuovere il cappuccio protettivo circolare dall'ago connettore.

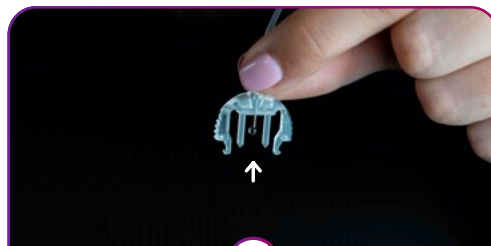

Riconnessione

E

Tenere il set di infusione con l'ago rivolto verso il basso. Caricare il set di infusione secondo le istruzioni fornite dal produttore della pompa fino a quando l'insulina non fuoriesce dall'ago. Assicurarsi che non vi siano bolle d'aria nel tubo.

⚠ Attenzione

Non riempire mai il tubo mentre il set di infusione è collegato al corpo.



Riconnessione

F

Rimuovere il cappuccio di scollegamento dall'alloggiamento della cannula.



Riconnessione

G

Posizionare un dito davanti all'alloggiamento della cannula e spingere l'ago connettore dritto fino a sentire un "clic".