



Guía de flechas



Tirar



Empujar



Indicar



Girar

Preparación

Antes de empezar

Preparación

1

Antes de seguir los pasos descritos en esta guía, lea atentamente la información y las advertencias que se encuentran al final de la última página. Tenga en cuenta que la información proporcionada en esta guía no sustituye el consejo médico profesional ni la lectura de las instrucciones de uso (IFU) que vienen con el set de infusión.

Los pasos para el usuario de nuestros sets de infusión comfort™ y comfort™ short son idénticos.



Preparación

2

Lávese las manos antes de insertar el set de infusión.



Preparación

3

Elija el punto de inserción según las recomendaciones de su profesional de la salud. No utilice un área inmediatamente adyacente al punto de infusión anterior.



Preparación

4

Limpie la zona de inserción con un desinfectante según las indicaciones de su profesional sanitario. Asegúrese de que la zona se haya secado al aire antes de insertar el set de infusión.

Inserción



Inserción

5

Saque el set de infusión del embalaje estéril.

⚠ Precaución
Asegúrese de que el embalaje esté intacto para garantizar la esterilidad. No lo utilice si el set de infusión ya está abierto o presenta daños.



Inserción

6

Retire con cuidado el papel frontal del apósito.



Inserción

7

Gire y tire suavemente para quitar el protector de la aguja.



Inserción

8

Con una mano, presione la piel en el punto de inserción. Con la otra, inserte el set de infusión en un ángulo de 20 a 45 grados con respecto a la piel.



Guía de flechas



Tirar



Empujar



Indicar



Girar

Inserción



Inserción

9

Masajee suavemente la parte frontal del apósito sobre la piel.



Inserción

10

Coloque un dedo delante de la carcasa de la cánula y, presionando las empuñaduras laterales, retire con cuidado la aguja introductora tirando suavemente hacia fuera.



Inserción

11

Retire con cuidado el papel posterior del apósito. Evite tocarlo.



Inserción

12

Masajee suavemente el apósito sobre la piel.

Inserción



Inserción

13


Retire el papel del tubo y quite la tapa protectora circular del conector.



Inserción

14

Siga las instrucciones de uso del fabricante de la bomba para conectar el tubo del set de infusión a la bomba.

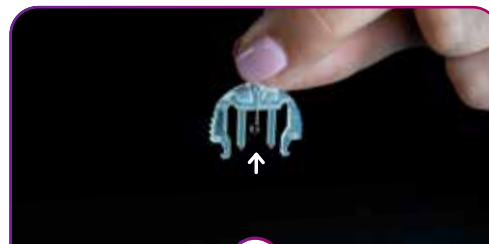

Inserción

15

Sujete el set de infusión con la aguja hacia abajo. Purgue el set de infusión según las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la bomba hasta que la insulina salga por la aguja. Asegúrese de que no haya burbujas de aire en el tubo.

⚠ Precaución

Nunca llene el tubo mientras el set de infusión esté conectado a su cuerpo.



Inserción

16

Coloque un dedo delante de la carcasa de la cánula y empuje el conector hacia dentro hasta que escuche un "clic".



Guía de flechas



Tirar



Empujar



Indicar



Girar

Inserción

Llene la cánula para
eliminar el espacio vacío

Inserción

17

Llene el espacio vacío en la cánula siguiendo las instrucciones del fabricante de la bomba.

⚠ Precaución

Revise siempre su nivel de glucosa en sangre entre 1 y 3 horas después de la inserción para garantizar que el set de infusión funcione correctamente. Mida su glucosa regularmente y consulte con su profesional de salud.


Desconectando



Desconectando

A

Este set de infusión le permite desconectarse temporalmente de la bomba. Coloque un dedo justo delante de la carcasa de la cánula, presione suavemente los lados del conector y tire hacia fuera con cuidado.

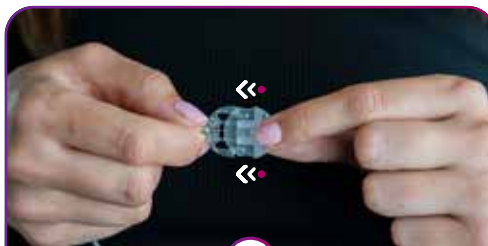

Desconectando

B

Conecte la tapa protectora circular al conector.



Desconectando

C

Conecte la tapa de desconexión a la carcasa de la cánula.

Guía de flechas



Tirar



Empujar



Indicar



Girar


Reconectando



Reconectando

D

Antes de reconectar el set de infusión, asegúrese de que el adhesivo siga firmemente adherido a la piel. Retire la tapa protectora circular del conector.

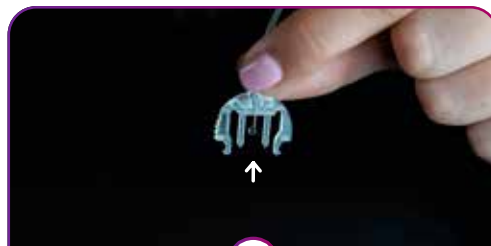

Reconectando

E

Sujete el set de infusión con la aguja hacia abajo. Purgue el set de infusión según las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la bomba hasta que la insulina salga por la aguja. Asegúrese de que no haya burbujas de aire en el tubo.

⚠ Precaución

Nunca llene el tubo mientras el set de infusión esté conectado a su cuerpo.



Reconectando

F

Retire la tapa de desconexión de la carcasa de la cánula.



Reconectando

G

Coloque un dedo delante de la carcasa de la cánula y empuje la aguja del conector hacia dentro hasta que escuche un "clic".