

Pfeillegende



Ziehen



Drücken



Zeigen



Drehen


Vorbereitung

Bevor Sie beginnen

Vorbereitung

1


Bevor Sie die in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Schritte ausführen, lesen Sie bitte die Informationen und Disclaimer unten auf der letzten Seite sorgfältig durch. Bitte beachten Sie, dass die Informationen in dieser Anleitung keinen Ersatz für ärztlichen Rat oder das Lesen der dem Infusionsset beiliegenden Produkthanleitung darstellen.

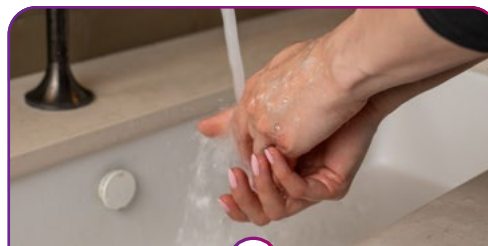

Vorbereitung

2

Waschen Sie Ihre Hände, bevor Sie das Infusionsset einsetzen.

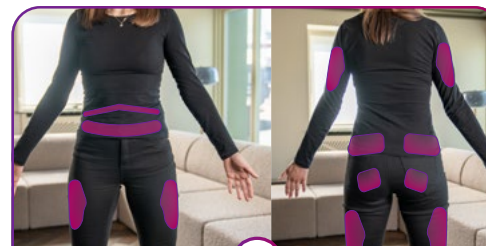

Vorbereitung

3

Wählen Sie die Einstichstelle entsprechend den Empfehlungen Ihres Arztes. Vermeiden Sie dabei Bereiche, die sich direkt neben der vorherigen Infusionsstelle befinden.



Vorbereitung

4

Reinigen Sie die Einstichstelle mit einem Desinfektionsmittel gemäß den Anweisungen Ihres Arztes. Achten Sie darauf, dass der Bereich vollständig luftgetrocknet ist, bevor Sie das Infusionsset einsetzen.

Einsetzen



Einsetzen

5

Ziehen Sie am roten Band, um die sterile Plastikversiegelung zu entfernen.

⚠ Vorsicht

Stellen Sie die Sterilität sicher, indem Sie prüfen, ob das Sterilpapier und die Sicherheitsversiegelung unbeschädigt sind. Verwenden Sie das Infusionsset nicht, wenn die Verpackung bereits geöffnet oder beschädigt ist.



Einsetzen

6

Entfernen Sie das Sterilpapier.



Einsetzen

7

Um die Kappe zu entfernen, drücken Sie mit einer Hand fest auf die drei erhöhten Noppen auf beiden Seiten der Kappe und heben Sie die Kappe mit der anderen Hand an.

⚠ Vorsicht

Achten Sie darauf, dass Sie die Einführnadel beim Vorbereiten der Einführhilfe und des Infusionssets nicht verbiegen oder berühren.



Einsetzen

8

Zum Abwickeln des Schlauches drehen Sie den Schlauchanfang vorsichtig aus der Kerbe heraus. Wickeln Sie den Schlauch nun von der Einführhilfe ab, indem Sie ihn vorsichtig nach oben ziehen.

⚠ Vorsicht

Ziehen Sie nicht zu stark, wenn der Schlauch vollständig abgewickelt ist, um ein versehentliches Lösen des Infusionssets aus der Einführhilfe zu vermeiden.

Pfeillegende



Ziehen



Drücken



Zeigen



Drehen

Einsetzen



Einsetzen

9

Befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen Ihres Pumpenherstellers, um den Schlauch des Infusionssets an das Pumpenreservoir und die Pumpe anzuschließen.



Einsetzen

10

Füllen Sie das Infusionsset gemäß der Gebrauchsanweisung des Pumpenherstellers, bis Insulin aus der Nadel austritt. Stellen Sie sicher, dass sich keine Luftblasen im Schlauch befinden.

Vorsicht

Halten Sie das Infusionsset mit der Nadel nach unten, um einen Kontakt zwischen dem Medikament und dem Schutzpapier des Pflasters zu vermeiden. Füllen Sie den Schlauch niemals, während das Infusionsset mit Ihrem Körper verbunden ist.



Einsetzen

11

Ziehen Sie vorsichtig nach oben, um das Schutzpapier vom Pflaster zu entfernen.

Tipp

Ziehen Sie nicht zu stark, um ein versehentliches Lösen des Infusionssets aus der Einführhilfe zu vermeiden.



Einsetzen


12

Um die Einführhilfe vorzubereiten, greifen Sie die geriffelten Vertiefungen auf beiden Seiten und drücken Sie leicht zu. Ziehen Sie an der Feder, bis Sie ein „Klick“ hören.

Tipp

Bevor Sie an der Feder ziehen, achten Sie darauf, dass der Schlauch locker über die Kante hängt und nicht in einer der Kerben steckt oder mit der Hand fixiert ist, da Sie sonst das Risiko eingehen, das Infusionsset aus der Einführhilfe zu lösen.

Einsetzen

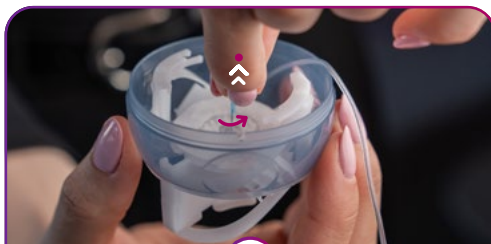

Einsetzen

13

Entfernen Sie den Nadelschutz, indem Sie ihn leicht drehen und dann vorsichtig abziehen. Berühren Sie beim Entfernen des Nadelschutzes nicht das Pflaster.

Tipp

Vergessen Sie nicht, den Nadelschutz vor dem Abziehen zu drehen, da dies das Entfernen erleichtert.



Einsetzen

14

Bevor Sie das Infusionsset positionieren, legen Sie den Schlauch in die nächstgelegene Kerbe, um sicherzustellen, dass er beim Einführen nicht unter der Einführhilfe eingeklemmt wird.

Tipp

Ziehen Sie beim Einlegen des Schlauchs in die Kerbe nicht zu stark, um ein Lösen des Infusionssets aus der Einführhilfe zu vermeiden.

Vorsicht

Wenn das Infusionsset vor dem Einsetzen nicht sicher in der Einführhilfe platziert ist und die Nadel nicht gerade nach oben zeigt, kann es zu Schmerzen oder leichten Verletzungen kommen.



Einsetzen

15

Überprüfen Sie, ob sich die weiche Softkanüle unterhalb der Spitze der Einstichsnadel befindet. Überspringen Sie diesen Schritt nicht, da er für das korrekte Einsetzen entscheidend ist.



Einsetzen

16

Um das Infusionsset einzusetzen, positionieren Sie die Einführhilfe über der Einstichsnadel und drücken Sie gleichzeitig auf die runden Vertiefungen auf beiden Seiten der Einführhilfe.

Tipp

Die Dreiecksform im Inneren der Einführhilfe zeigt in die Richtung, in die der Schlauch nach dem Einsetzen zeigt.

Pfeillegende



Ziehen



Drücken



Zeigen



Drehen

Einsetzen



Einsetzen

17


Drücken Sie leicht auf die Mitte der Einführhilfe, um das Pflaster auf der Haut zu befestigen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Infusionsset beim Entfernen der Einführhilfe sicher am Körper sitzt.



Einsetzen

18

Entfernen Sie die Einführhilfe und die Einführnadel, indem Sie die Mitte greifen und vorsichtig zurückziehen. Massieren Sie das Pflaster vorsichtig, um sicherzustellen, dass es fest auf der Haut sitzt.

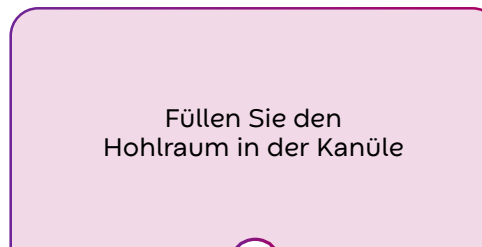

Einsetzen

19

Füllen Sie den Hohlraum in der Kanüle gemäß den Anweisungen Ihres Pumpenherstellers.

⚠ Vorsicht

Überprüfen Sie Ihren Blutzuckerwert immer ein bis drei Stunden nach dem Einsetzen, um sicherzustellen, dass das Infusionsset ordnungsgemäß funktioniert. Messen Sie Ihren Blutzucker regelmäßig. Besprechen Sie dies mit Ihrem Arzt.



Einsetzen

20

Um die Einführhilfe für eine sichere Entsorgung zu schließen, drücken Sie die Kappe wieder auf die Einführhilfe, bis Sie ein „Klick“ hören.

Trennen



Trennen

A

Mit diesem Infusionsset können Sie Ihre Verbindung zur Pumpe vorübergehend trennen, ohne das Infusionsset wechseln zu müssen.

Halten Sie das Pflaster in Position, indem Sie einen Finger direkt vor das Kanülengehäuse legen und die Seiten des Kupplungsteils leicht zusammendrücken. Ziehen Sie das Kupplungsteil gerade aus dem Kanülengehäuse heraus.



Trennen

B

Verbinden Sie die Trennabdeckung mit dem Kanülengehäuse, bis Sie ein „Klick“ hören.



Pfeillegende



Ziehen



Drücken




Zeigen



Drehen

Wiederverbinden

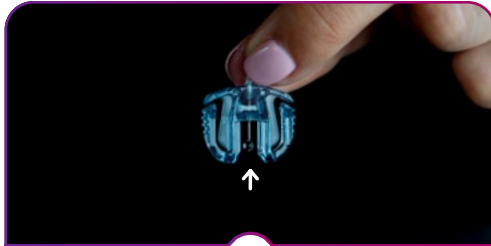

Wiederverbinden


C

Stellen Sie vor dem Wiederverbinden des Infusionssets sicher, dass das Pflaster noch sicher auf der Haut sitzt.

Wenn nötig, füllen Sie das Infusionsset, bis Insulin aus der Nadel austritt.

⚠ Vorsicht


Halten Sie das Infusionsset beim Füllen mit der Nadel nach unten. Füllen Sie den Schlauch niemals, während das Infusionsset mit Ihrem Körper verbunden ist.

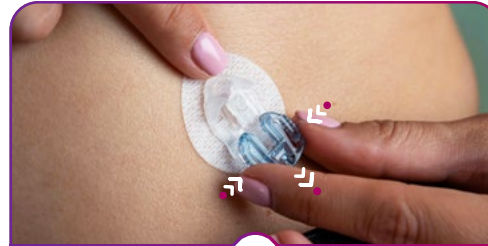

Wiederverbinden

D

Legen Sie einen Finger auf das Pflaster direkt vor dem Kanülengehäuse. Entfernen Sie die Trennabdeckung.

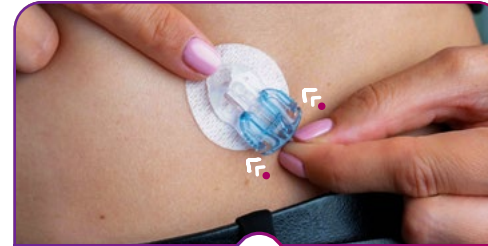

Wiederverbinden

E

Legen Sie einen Finger auf das Pflaster direkt vor dem Kanülengehäuse.

Führen Sie das Kupplungsteil gerade ein, bis Sie ein „Klick“ hören.