

Guida della freccia



Tirare



Spingere



Punto



Ruotare


Preparazione

Prima di iniziare

Preparazione

1


Prima di seguire le istruzioni descritte in questo manuale, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate in fondo all'ultima pagina. Si prega di notare che le informazioni fornite in questo manuale non sostituiscono il parere di un medico o la lettura delle istruzioni per l'uso (IFU) fornite con il set di infusione.

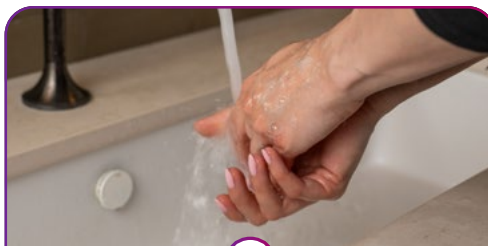

Preparazione

2

Lavarsi le mani prima di inserire il set di infusione.

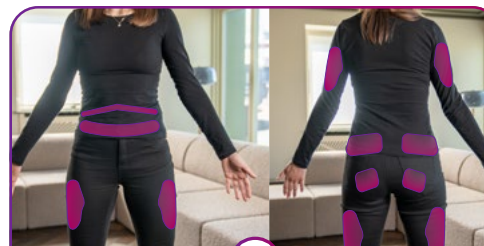

Preparazione

3

Scegliere il sito di inserimento raccomandato dal medico. Non utilizzare un'area adiacente al sito di infusione precedente.



Preparazione

4

Pulire la zona di inserimento con un disinfettante, come indicato dal medico. Assicurarsi che la zona sia asciutta all'aria prima di inserire il set di infusione.

Inserimento



Inserimento

5

Tirare il nastro rosso per rimuovere il sigillo di plastica sterile.

⚠ Attenzione

Assicurare la sterilità controllando che la carta sterile e il sigillo di sicurezza siano integri. Non utilizzare se il set di infusione è già aperto o danneggiato.



Inserimento

6

Rimuovere la carta sterile.



Inserimento

7

Per rimuovere il coperchio, premere con decisione con una mano i tre punti in rilievo su ciascun lato del coperchio e sollevare il coperchio con l'altra mano.

⚠ Attenzione

Fare attenzione a non piegare o toccare l'ago introduttore durante la preparazione del dispositivo di inserimento e del set di infusione.



Inserimento

8

Per srotolare il tubo, ruotare delicatamente l'inizio del tubo fuori dalla fessura. Ora srotolare il tubo dal dispositivo di inserimento tirandolo delicatamente verso l'alto.

⚠ Attenzione

Non tirare troppo forte quando il tubo è completamente rilasciato per evitare di sollevare accidentalmente il set di infusione dal dispositivo di inserimento.

Guida della freccia



Tirare



Spingere



Punto



Ruotare

Inserimento



Inserimento

9

Seguire le istruzioni per l'uso fornite dal produttore della pompa per collegare il tubo del set di infusione al serbatoio della pompa e alla pompa.



Inserimento

10

Caricare il set di infusione secondo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore della pompa fino a quando l'insulina non fuoriesce dall'ago. Assicurarsi che non vi siano bolle d'aria nel tubo.

⚠ Attenzione

Tenere il set di infusione con l'ago rivolto verso il basso per evitare il contatto tra il farmaco e la carta adesiva di supporto. Non riempire mai il tubo mentre il set di infusione è collegato al corpo.



Inserimento

11

Tirare delicatamente verso l'alto per rimuovere la carta protettiva dall'adesivo.

📌 Suggerimento

Non tirare troppo forte per evitare di sollevare accidentalmente il set di infusione dal dispositivo di inserimento.



Inserimento


12

Per preparare il dispositivo di inserimento, afferrare e premere leggermente le scanalature presenti su ciascun lato. Tirare la molla fino a sentire un "clic".

📌 Suggerimento

Prima di tirare la molla, assicurarsi che il tubo penda liberamente dal bordo e non sia inserito in una delle fessure o fissato manualmente, altrimenti si rischia di staccare il set di infusione dal dispositivo di inserimento.

Inserimento

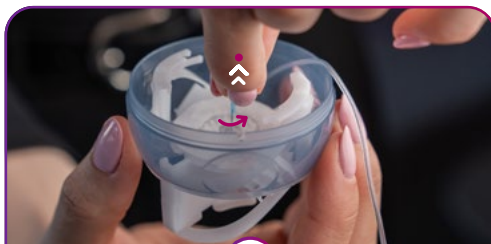

Inserimento

13

Rimuovere la protezione dell'ago ruotandola delicatamente e tirandola con cautela. Evitare di toccare il nastro adesivo quando si rimuove la protezione dell'ago.

📌 Suggerimento

Non dimenticare di ruotare la protezione dell'ago prima di rimuoverla, poiché ciò aiuta a rimuoverla delicatamente.



Inserimento

14

Prima di posizionare il set di infusione, posizionare il tubo nella fessura più vicina per assicurarsi che non rimanga incastrato sotto il dispositivo di inserimento durante l'inserimento.

📌 Suggerimento

Non tirare troppo forte quando si inserisce il tubo nella fessura per evitare di staccare il set di infusione dal dispositivo di inserimento.

⚠ Attenzione

Se il set di infusione non è posizionato saldamente nel dispositivo di inserimento con l'ago rivolto dritto in avanti prima dell'inserimento, potrebbero verificarsi dolore o lievi lesioni.



Inserimento

15

Verificare che la cannula morbida si trovi sotto la punta dell'ago introduttore. Non saltare questo passaggio, poiché è fondamentale per garantire un inserimento corretto.



Inserimento

16

Per inserire il set di infusione, posizionare il dispositivo di inserimento sul sito di inserimento e premere contemporaneamente le rientranze rotonde su entrambi i lati dell'inserimento.

📌 Suggerimento

La forma triangolare all'interno del dispositivo di inserimento indica la direzione in cui sarà rivolto il tubo dopo l'inserimento.

Guida della freccia



Tirare



Spingere



Punto



Ruotare

Inserimento



Inserimento

17


Premere delicatamente al centro del dispositivo di inserimento per fissare l'adesivo sulla pelle. Questo aiuta a garantire che il set di infusione aderisca saldamente al corpo quando si rimuove il dispositivo di inserimento.



Inserimento

18

Rimuovere il dispositivo di inserimento e l'ago inseritore afferrandolo al centro e tirandolo delicatamente indietro. Massaggiare delicatamente il cerotto adesivo per assicurarsi che aderisca perfettamente alla pelle.

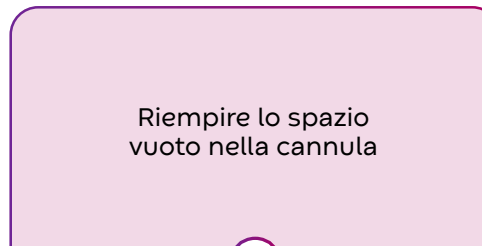

Inserimento

19

Riempire lo spazio vuoto nella cannula

Riempire lo spazio vuoto nella cannula seguendo le istruzioni fornite dal produttore della pompa.

⚠ Attenzione

Controllare sempre la glicemia da una a tre ore dopo l'inserimento per assicurarsi che il set di infusione funzioni correttamente. Misurare la glicemia regolarmente. Discutere di questo aspetto con il proprio medico.



Inserimento

20

Per chiudere il dispositivo di inserimento e smaltirlo in sicurezza, spingere indietro il coperchio sull'inserito finché non si sente un "clic".

Disconnessione



Disconnessione

A

Questo set di infusione consente di scollegare temporaneamente la pompa senza dover cambiare il set di infusione.

Mantenere il nastro adesivo in posizione posizionando un dito appena davanti all'alloggiamento della cannula e premere delicatamente i lati del connettore. Estrarre l'ago connettore dall'alloggiamento della cannula.



Disconnessione

B

Inserire il cappuccio di disconnessione nell'alloggiamento della cannula finché non si sente un "clic".



Guida della freccia



Tirare



Spingere




Punto



Ruotare

Riconnessione

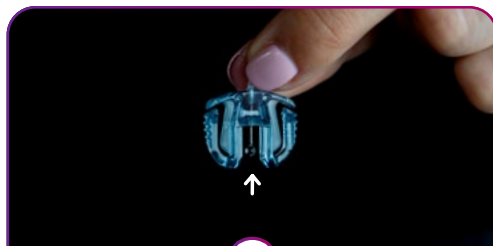

Riconnessione

C

Prima di ricollegare il set di infusione, assicurarsi che l'adesivo aderisca ancora saldamente alla pelle.

Se necessario, caricare il set di infusione finché l'insulina non fuoriesce dall'ago.

⚠ Attenzione


Durante il caricamento del set di infusione, tenere il set di infusione con l'ago rivolto verso il basso. Non riempire mai il tubo mentre il set di infusione è collegato al corpo.



Riconnessione

D

Posizionare un dito sul nastro adesivo appena davanti all'alloggiamento della cannula. Rimuovere il cappuccio di disconnessione.

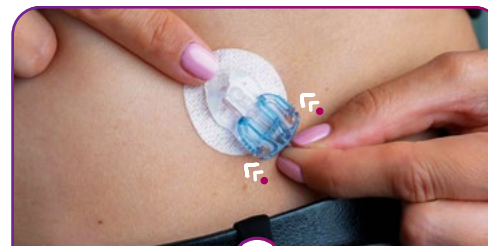

Riconnessione

E

Posizionare un dito sul nastro adesivo appena davanti all'alloggiamento della cannula.

Spingere l'ago del connettore dritto fino a sentire un "clic".