



Guide des flèches



Tirer



Pousser



Pointer



Dérouler


Préparation

Avant de commencer

Préparation

1


Avant de suivre les étapes décrites dans ce guide d'utilisation, veuillez lire attentivement les informations et les avertissements figurant au bas de la dernière page. Veuillez noter que les informations fournies dans ce guide ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de santé ni la lecture des instructions d'emploi fournies avec le dispositif de perfusion.

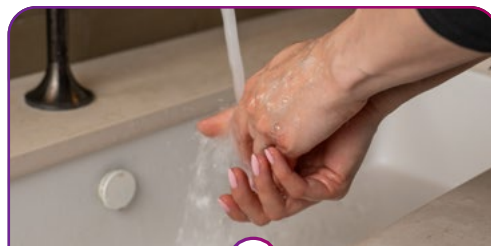

Préparation

2

Lavez-vous les mains avant d'insérer le dispositif de perfusion.

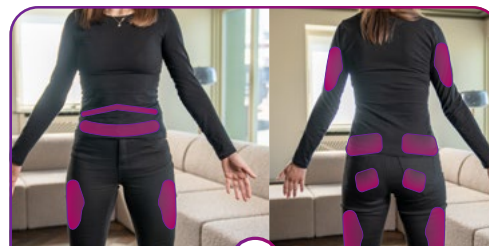

Préparation

3

Choisissez un site d'insertion selon les recommandations de votre professionnel de santé. N'utilisez pas la zone située juste à côté de votre ancien site de perfusion.



Préparation

4

Nettoyez la zone d'insertion avec un désinfectant, selon les instructions de votre professionnel de santé. Assurez-vous que la zone a bien séché à l'air libre avant d'insérer le dispositif de perfusion.

Insertion



Insertion

5

Ouvrir le blister et en extraire le contenu.

⚠ Attention


Assurez-vous de la stérilité du dispositif en vérifiant l'intégrité de l'emballage. Ne pas utiliser si le dispositif de perfusion est déjà ouvert ou s'il a été endommagé.



Insertion

6

Tirez doucement pour décoller le papier du ruban adhésif. Attention à ne pas toucher le ruban adhésif.

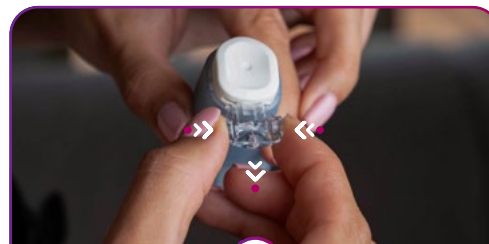

Insertion

7

Retirez le capuchon de déconnexion du dispositif d'insertion en appuyant doucement sur les côtés tout en le tirant vers l'extérieur. Conservez le capuchon pour une utilisation ultérieure.



Insertion

8

Avant de placer le dispositif d'insertion contre la peau, notez que les flèches sur le dispositif d'insertion indiquent où la tubulure sera connectée après l'insertion.

Guide des flèches



Tirer



Pousser




Pointer



Dérouler

Insertion

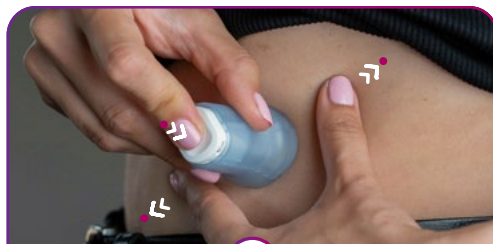

Insertion 9

Étirez délicatement la peau et assurez-vous que sa surface est plane et tendue. Positionnez le dispositif d'insertion sur la peau et appuyez à fond sur le bouton de déverrouillage pour insérer la canule.



Insertion 10

Retirez délicatement le dispositif d'insertion. Le produit est désormais en mode sécurisé, le bouton de déverrouillage étant enfoncé.



Insertion 11


Massez délicatement le ruban adhésif sur la peau. Changez de produit et changez de site si le ruban adhésif se décolle.



Insertion 12


Retirez le papier de la tubulure. Suivez les instructions du fabricant de votre pompe pour connecter la tubulure du dispositif de perfusion au réservoir et à la pompe.

Insertion

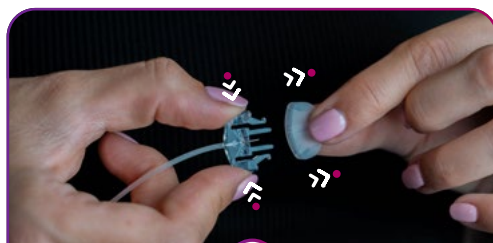

Insertion 13

Retirez le capuchon protecteur du connecteur de site en appuyant doucement sur les côtés du connecteur, puis en retirant le capuchon protecteur. Conservez le capuchon pour une utilisation ultérieure.

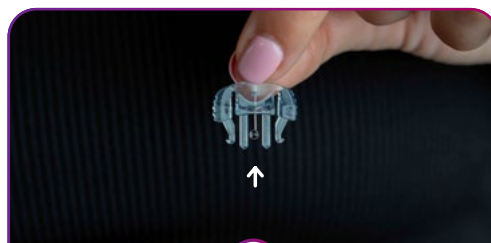

Insertion 14

Tenez le dispositif de perfusion, aiguille pointée vers le bas. Amorcez le dispositif conformément aux instructions du fabricant de la pompe jusqu'à ce que de l'insuline soit libérée par l'aiguille. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'air dans la tubulure.


⚠ Attention

Ne remplissez jamais la tubulure lorsque le dispositif de perfusion est connecté à votre corps.



Insertion 15

Pour connecter le connecteur de site au boîtier de canule, placez un doigt sur le boîtier de canule tout en poussant le connecteur jusqu'à entendre un clic. Vérifiez régulièrement le site d'insertion pour vous assurer que la canule souple reste en place et qu'il n'est pas irrité. Changez de produit et de site si nécessaire. Pensez à conserver les capuchons de déconnexion pour une utilisation ultérieure.

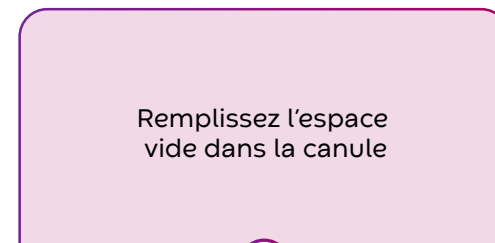

Insertion 16

Remplissez l'espace vide dans la canule

Remplissez l'espace vide dans la canule en suivant les instructions du fabricant de votre pompe.

⚠ Attention

Vérifiez toujours votre glycémie une à trois heures après l'insertion du dispositif de perfusion afin de vous assurer de son bon fonctionnement. Mesurez régulièrement votre glycémie. Discutez-en avec votre professionnel de santé.

Guide des flèches



Tirer



Pousser



Pointer



Dérourer


Déconnexion



Déconnexion

A


Ce dispositif de perfusion vous permet de déconnecter temporairement votre pompe sans avoir à le changer. Placez un doigt sur le boîtier de canule et pressez doucement les côtés du connecteur de site. Retirez le connecteur de site du boîtier de canule en tirant dessus.

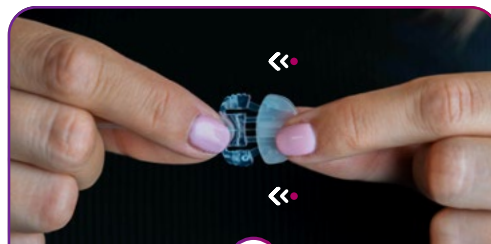

Déconnexion

B

Placer le capuchon de protection sur le connecteur de site.

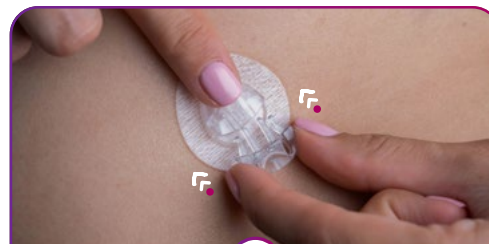

Déconnexion

C

Insérez le couvercle de déconnexion dans le boîtier de canule jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».



Guide des flèches



Tirer



Pousser




Pointer



Dérouler


Reconnexion

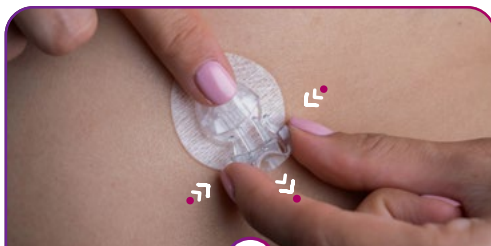

Reconnexion

D


Retirez le couvercle de déconnexion en plaçant un doigt sur le boîtier de canule et en pressant doucement les côtés du couvercle. Retirez le couvercle du boîtier de canule en le tirant vers vous.

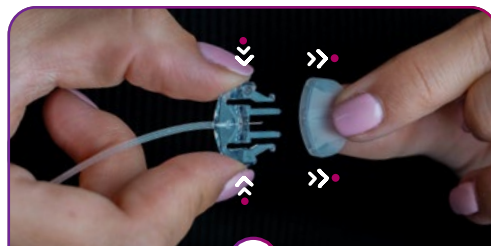

Reconnexion

E

Retirez le capuchon de protection du connecteur de site en pressant doucement les côtés du connecteur de site, puis en retirant le capuchon de protection.

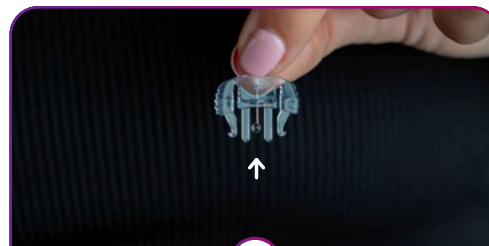

Reconnexion

F

Tenez le dispositif de perfusion, aiguille pointée vers le bas. Amorcez le dispositif conformément aux instructions du fabricant de la pompe jusqu'à ce que l'insuline sorte de l'aiguille. Assurez-vous qu'il n'y a pas de bulles d'air dans la tubulure.

⚠ Attention

Ne remplissez jamais la tubulure lorsque le dispositif de perfusion est connecté à votre corps.



Reconnexion

G

Pour connecter le connecteur du site au boîtier de canule, placez un doigt sur le boîtier de canule tout en poussant le connecteur de site directement jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».