

Pfeillegende



Ziehen



Drücken



Zeigen



Drehen


Vorbereitung

Bevor Sie beginnen

Vorbereitung

1


Bevor Sie die in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Schritte ausführen, lesen Sie bitte die Informationen und Disclaimer unten auf der letzten Seite sorgfältig durch. Bitte beachten Sie, dass die Informationen in dieser Anleitung keinen Ersatz für ärztlichen Rat oder das Lesen der dem Infusionsset beiliegenden Produkthanleitung darstellen.

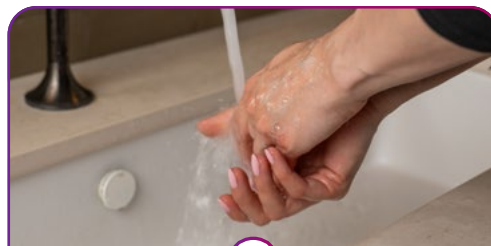

Vorbereitung

2

Waschen Sie Ihre Hände, bevor Sie das Infusionsset einsetzen.

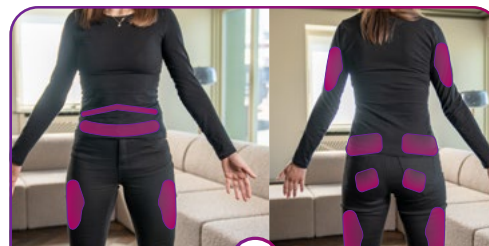

Vorbereitung

3

Wählen Sie die Einstichstelle entsprechend den Empfehlungen Ihres Arztes. Vermeiden Sie dabei Bereiche, die sich direkt neben der vorherigen Infusionsstelle befinden.



Vorbereitung

4

Reinigen Sie die Einstichstelle mit einem Desinfektionsmittel gemäß den Anweisungen Ihres Arztes. Achten Sie darauf, dass der Bereich vollständig luftgetrocknet ist, bevor Sie das Infusionsset einsetzen.

Einsetzen



Einsetzen

5

Öffnen Sie die Blisterpackung und entnehmen Sie den Inhalt.

⚠ Vorsicht


Stellen Sie die Sterilität sicher, indem Sie die Verpackung auf Unversehrtheit prüfen. Verwenden Sie das Infusionsset nicht, wenn die Verpackung bereits geöffnet oder beschädigt ist.



Einsetzen

6

Ziehen Sie vorsichtig, um das Schutzpapier vom Pflaster zu entfernen. Achten Sie darauf, das Pflaster nicht zu berühren.

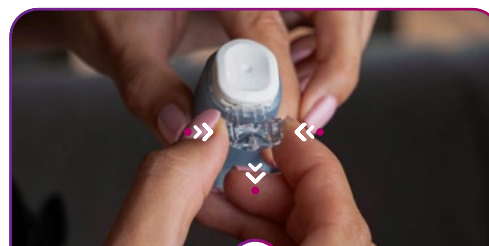

Einsetzen

7

Entfernen Sie die Trennabdeckung von der Einführhilfe, indem Sie die Seiten der Trennabdeckung leicht zusammendrücken und sie gleichzeitig gerade herausziehen. Bewahren Sie die Trennabdeckung für die spätere Verwendung auf.



Einsetzen

8

Bevor Sie die Einführhilfe an die Haut anlegen, beachten Sie, dass die Pfeile auf der Einführhilfe anzeigen, wo der Schlauch nach dem Einführen angeschlossen wird.

Pfeillegende



Ziehen



Drücken




Zeigen



Drehen

Einsetzen

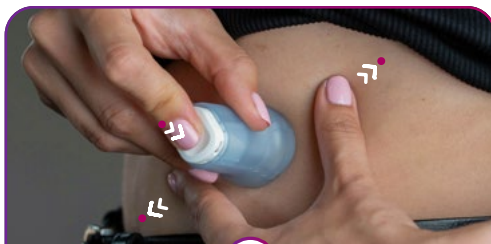

Einsetzen

9

Ziehen Sie die Haut sanft straff und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche flach und gespannt ist. Positionieren Sie die Einführhilfe auf der Haut und drücken Sie den Auslöseknopf vollständig nach unten, um das Infusionsset einzusetzen.



Einsetzen

10


Entfernen Sie vorsichtig die Einführhilfe. Das Produkt befindet sich nun im Sicherheitsmodus mit heruntergedrücktem Auslöseknopf.



Einsetzen

11

Massieren Sie das Pflaster sanft auf die Haut. Wechseln Sie zu einem neuen Produkt und einer neuen Stelle, wenn sich das Pflaster löst.

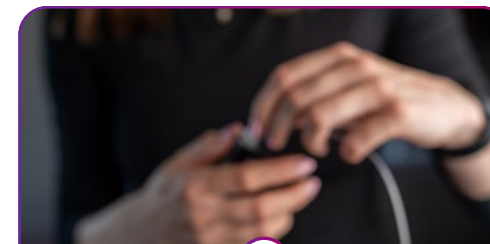


Einsetzen

12

Entfernen Sie das Papier vom Schlauch. Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung Ihres Pumpenherstellers, um den Schlauch des Infusionssets mit dem Pumpenreservoir und der Pumpe zu verbinden.


Einsetzen

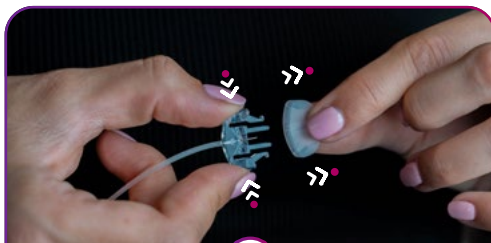

Einsetzen

13

Entfernen Sie die Schutzkappe des Kupplungsteils, indem Sie die Seiten des Kupplungsteils leicht zusammendrücken und dann die Schutzkappe abziehen. Bewahren Sie die Kappe für die spätere Verwendung auf.

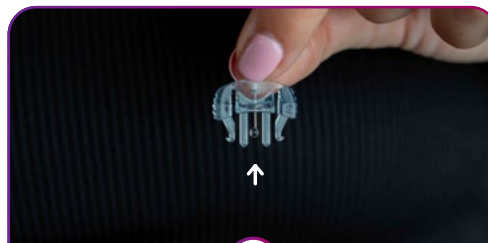


Einsetzen

14

Halten Sie das Infusionsset mit der Nadel nach unten. Füllen Sie das Infusionsset gemäß den Anweisungen des Pumpenherstellers, bis Insulin aus der Nadel austritt. Stellen Sie sicher, dass sich keine Luft im Schlauch befindet.

Vorsicht

Füllen Sie den Schlauch niemals, während das Infusionsset mit Ihrem Körper verbunden ist.

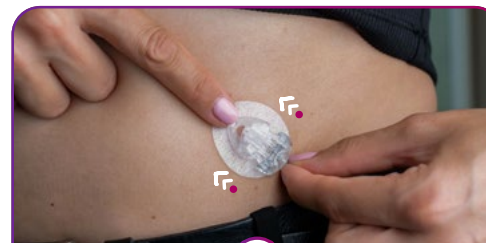

Einsetzen

15

Um das Kupplungsteil mit dem Kanülengehäuse zu verbinden, legen Sie einen Finger auf das Kanülengehäuse und führen Sie das Kupplungsteil gerade ein, bis Sie ein „Klick“ hören. Überprüfen Sie die Einstichstelle regelmäßig, um sicherzustellen, dass die Kanüle an ihrem Platz bleibt und die Stelle nicht gereizt ist. Wechseln Sie bei Bedarf zu einem neuen Produkt und einer neuen Einstichstelle. Bewahren Sie die Abdeckungen für die spätere Verwendung auf.

Füllen Sie den Hohlraum in der Kanüle

Einsetzen

16

Füllen Sie den Hohlraum in der Kanüle gemäß den Anweisungen Ihres Pumpenherstellers.

Vorsicht

Überprüfen Sie Ihren Blutzuckerspiegel immer ein bis drei Stunden nach dem Einsetzen, um sicherzustellen, dass das Infusionsset ordnungsgemäß funktioniert. Messen Sie Ihren Blutzucker regelmäßig. Besprechen Sie dies mit Ihrem Arzt.

Pfeillegende



Ziehen



Drücken



Zeigen



Drehen


Trennen



Trennen

A


Mit diesem Infusionsset können Sie die Verbindung zur Pumpe vorübergehend trennen, ohne das Infusionsset wechseln zu müssen. Legen Sie einen Finger auf das Kanülengehäuse und drücken Sie leicht auf die Seiten des Kupplungsteils. Ziehen Sie das Kupplungsteil gerade aus dem Kanülengehäuse heraus.

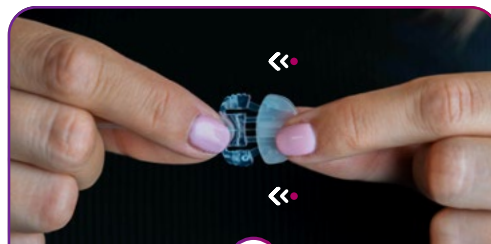

Trennen

B

Setzen Sie die Schutzkappe auf das Kupplungsteil.

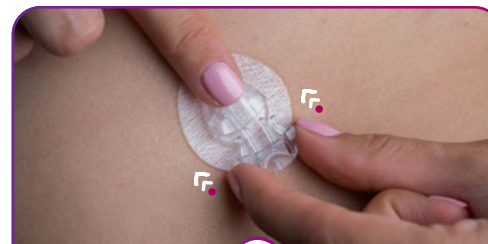

Trennen

C

Stecken Sie die Trennabdeckung in das Kanülengehäuse, bis Sie ein „Klick“ hören.

Pfeillegende



Ziehen



Drücken




Zeigen



Drehen


Wiederverbinden

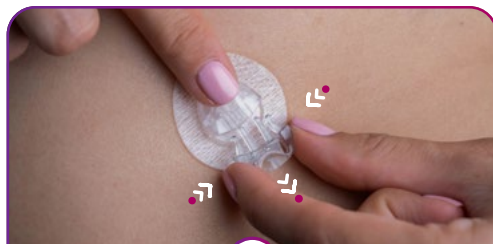

Wiederverbinden

D


Entfernen Sie die Trennabdeckung, indem Sie einen Finger auf das Kanülengehäuse legen und die Seiten der Abdeckung leicht zusammendrücken. Ziehen Sie die Abdeckung gerade aus dem Kanülengehäuse.

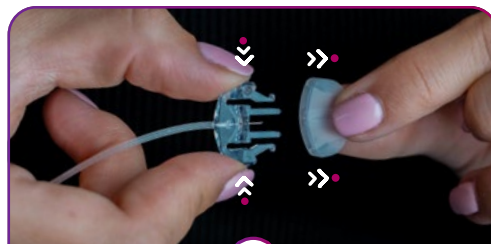

Wiederverbinden

E

Entfernen Sie die Schutzkappe vom Kupplungsteil, indem Sie die Seiten des Kupplungsteils leicht zusammendrücken und dann die Schutzkappe abziehen.

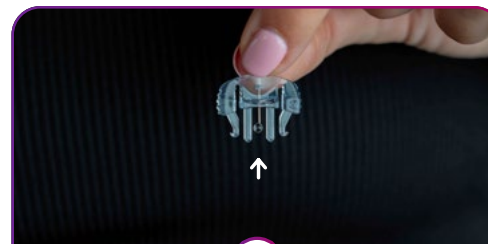

Wiederverbinden

F

Halten Sie das Infusionsset mit der Nadel nach unten. Füllen Sie das Infusionsset gemäß der Gebrauchsanweisung des Pumpenherstellers, bis Insulin aus der Nadel austritt. Stellen Sie sicher, dass sich keine Luftblasen im Schlauch befinden.

⚠ Vorsicht

Füllen Sie den Schlauch niemals, während das Infusionsset mit Ihrem Körper verbunden ist.



Wiederverbinden

G

Um das Kupplungsteil mit dem Kanülengehäuse zu verbinden, legen Sie einen Finger auf das Kanülengehäuse und führen sie das Kupplungsteil gerade ein, bis Sie ein „Klick“ hören.