

Guida della freccia



Tirare



Spingere



Punto



Ruotare


Preparazione

Prima di iniziare

Preparazione

1


Prima di seguire le istruzioni descritte in questo manuale, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate in fondo all'ultima pagina. Si prega di notare che le informazioni fornite in questo manuale non sostituiscono il parere di un medico o la lettura delle istruzioni per l'uso (IFU) fornite con il set di infusione.

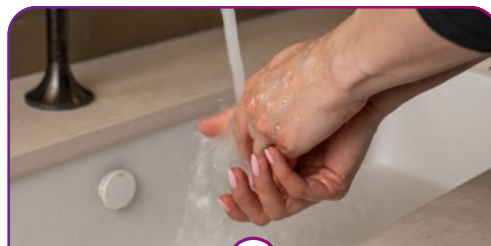

Preparazione

2

Lavarsi le mani prima di inserire il set di infusione.

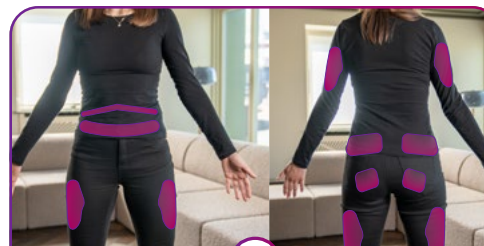

Preparazione

3

Scegliere il sito di inserimento raccomandato dal medico. Non utilizzare un'area adiacente al sito di infusione precedente.



Preparazione

4

Pulire la zona di inserimento con un disinfettante, come indicato dal medico. Assicurarsi che la zona sia asciutta all'aria prima di inserire il set di infusione.

Inserimento



Inserimento

5

Aprire il blister ed estrarre il contenuto.

⚠ Attenzione


Assicurare la sterilità controllando che la confezione sia integra. Non utilizzare se il set di infusione è già aperto o danneggiato.



Inserimento

6

Tirare delicatamente per rimuovere la carta dal nastro adesivo. Fare attenzione a non toccare il nastro adesivo.

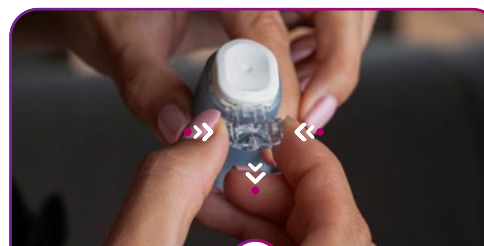

Inserimento

7

Rimuovere il coperchio di disconnessione dal dispositivo di inserimento premendo delicatamente i lati del coperchio di disconnessione mentre lo si tira verso l'esterno. Conservare il coperchio di disconnessione per un uso successivo.



Inserimento

8

Prima di posizionare il dispositivo di inserimento sulla pelle, tenere presente che le frecce sul dispositivo di inserimento indicano il punto in cui verrà collegato il tubo dopo l'inserimento.



Guida della freccia



Tirare



Spingere




Punto



Ruotare

Inserimento

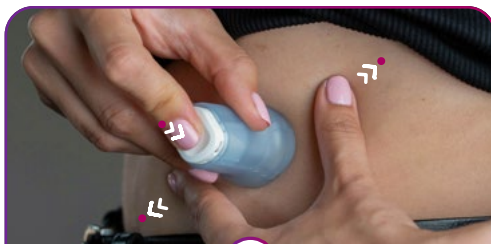

Inserimento

9

Tendere delicatamente la pelle e assicurarsi che la superficie sia piana e tesa. Posizionare il dispositivo di inserimento sulla pelle e premere completamente il pulsante di rilascio per inserire il set di infusione.



Inserimento

10

Rimuovere delicatamente il dispositivo di inserimento. Il prodotto è ora in modalità sicura con il pulsante di rilascio premuto.



Inserimento

11

Massaggiare delicatamente il nastro adesivo sulla pelle. Se il nastro adesivo si allenta, passare a un nuovo prodotto e ad una nuova zona.




Inserimento

12

Rimuovere la carta dal tubo. Seguire le istruzioni per l'uso fornite dal produttore della pompa per collegare il tubo del set di infusione al serbatoio della pompa e alla pompa.


Inserimento

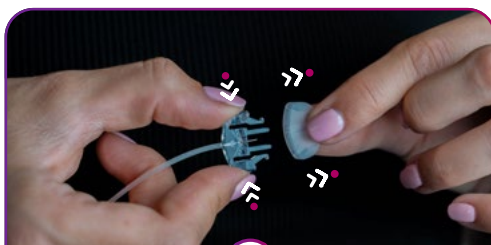

Inserimento

13

Rimuovere il cappuccio protettivo del connettore del sito premendo delicatamente i lati del connettore e quindi tirando il cappuccio protettivo. Conservare il cappuccio per un uso successivo.

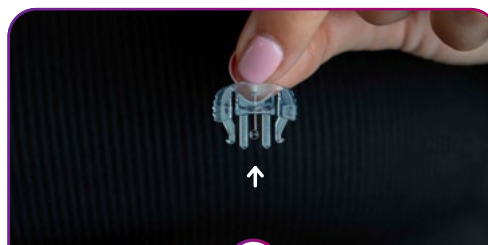


Inserimento

14

Tenere il set di infusione con l'ago rivolto verso il basso. Caricare il set di infusione secondo le istruzioni fornite dal produttore della pompa fino a quando l'insulina non fuoriesce dall'ago. Assicurarsi che non vi sia aria nel tubo.

⚠ Attenzione

Non riempire mai il tubo mentre il set di infusione è collegato al corpo.

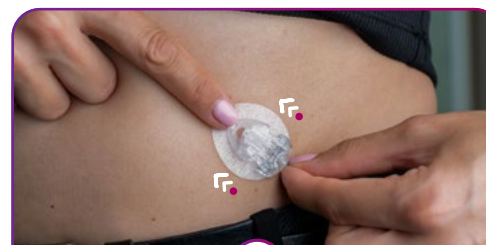

Inserimento

15

Per collegare il connettore del sito all'alloggiamento della cannula, posizionare un dito sull'alloggiamento della cannula e spingere il connettore del sito in avanti fino a sentire un "clac". Controllare frequentemente il sito di inserimento per assicurarsi che la cannula morbida rimanga in posizione e che il sito non sia irritato. Se necessario, sostituire il prodotto e il sito. Ricordarsi di conservare le protezioni per un uso successivo.

Riempire lo spazio vuoto nella cannula

Inserimento

16

Riempire lo spazio vuoto nella cannula seguendo le istruzioni fornite dal produttore della pompa.

⚠ Attenzione

Controllare sempre la glicemia da una a tre ore dopo l'inserimento per assicurarsi che il set di infusione funzioni correttamente. Misurare la glicemia regolarmente. Discutere di questo aspetto con il proprio medico.



Guida della freccia



Tirare



Spingere



Punto



Ruotare


Disconnessione



Disconnessione

A


Questo set di infusione consente di scollegare temporaneamente la pompa senza dover sostituire il set. Posizionare un dito sull'alloggiamento della cannula e premere delicatamente i lati del connettore del sito di infusione. Estrarre il connettore del sito di infusione dall'alloggiamento della cannula.

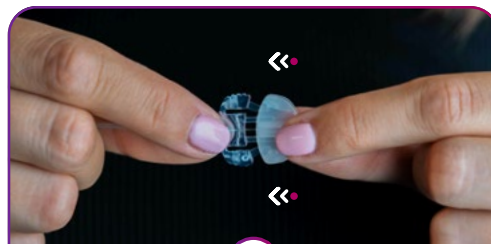

Disconnessione

B

Posizionare il cappuccio protettivo sul connettore del sito.

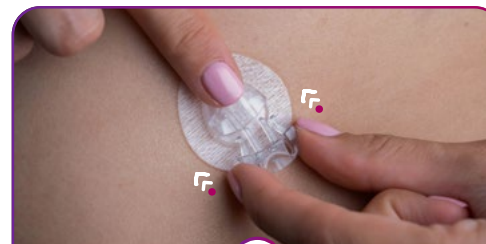

Disconnessione

C

Inserire il cappuccio di disconnessione nell'alloggiamento della cannula finché non si sente un "clic".



Guida della freccia



Tirare



Spingere




Punto



Ruotare


Riconnessione

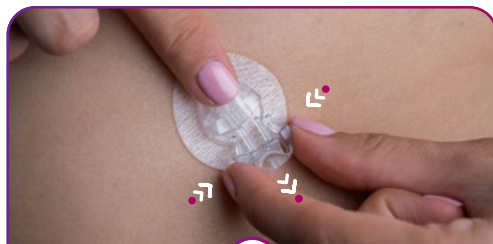

Riconnessione

D


Rimuovere il cappuccio di disconnessione posizionando un dito sull'alloggiamento della cannula e premendo delicatamente i lati del coperchio. Estrarre il coperchio dall'alloggiamento della cannula.

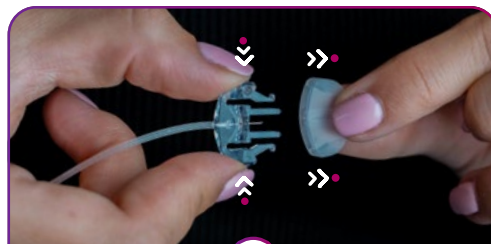

Riconnessione

E

Rimuovere il cappuccio protettivo dal connettore del sito premendo delicatamente i lati del connettore del sito e quindi tirando via il cappuccio protettivo.

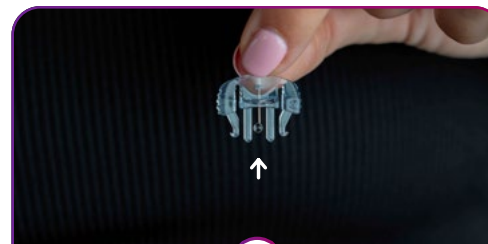

Riconnessione

F

Tenere il set di infusione con l'ago rivolto verso il basso. Caricare il set di infusione secondo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore della pompa fino a quando l'insulina non fuoriesce dall'ago. Assicurarsi che non vi siano bolle d'aria nel tubo.

Attenzione

Non riempire mai il tubo mentre il set di infusione è collegato al corpo.



Riconnessione

G

Per collegare il connettore del sito all'alloggiamento della cannula, posizionare un dito sull'alloggiamento della cannula e spingere il connettore del sito verso l'interno finché non si sente un "clic".