



Guía de flechas



Tirar



Empujar



Indicar



Girar

Preparación

Antes de empezar

Preparación

1

Antes de seguir los pasos descritos en esta guía, lea atentamente la información y las advertencias que se encuentran al final de la última página. Tenga en cuenta que la información proporcionada en esta guía no sustituye el consejo médico profesional ni la lectura de las instrucciones de uso (IFU) que vienen con el set de infusión.



Preparación

2

Lávese las manos antes de insertar el set de infusión.



Preparación

3

Elija el punto de inserción según las recomendaciones de su profesional de la salud. No utilice un área inmediatamente adyacente al punto de infusión anterior.



Preparación

4

Limpie la zona de inserción con un desinfectante según las indicaciones de su profesional sanitario. Asegúrese de que la zona se haya secado al aire antes de insertar el set de infusión.

Inserción



Inserción

5

Abra el blíster y retire el contenido.

⚠ Precaución

Asegúrese de que el envase esté intacto para garantizar la esterilidad. No lo utilice si el set de infusión ya está abierto o dañado.



Inserción

6

Tire hacia fuera suavemente para retirar el papel del apósito. Tenga cuidado de no tocarlo.



Inserción

7

Retire la tapa del dispositivo de inserción apretando suavemente los lados mientras tira de ella hacia fuera. Conserve la tapa para usarla más adelante.



Inserción

8

Antes de colocar el dispositivo de inserción sobre la piel, tenga en cuenta que las flechas del dispositivo indican dónde se conectará el tubo después de la inserción.

Guía de flechas



Tirar



Empujar



Indicar



Girar

Inserción



Inserción 9

Estire suavemente la piel y asegúrese de que la superficie esté plana y tensa. Coloque el dispositivo de inserción sobre la piel y presione completamente el botón de liberación para insertar el set de infusión.



Inserción 10

Retire con cuidado el dispositivo de inserción. El producto está ahora en modo seguro con el botón de liberación presionado.



Inserción 11

Masajee suavemente el apósito sobre la piel. Reemplace el producto y seleccione una nueva zona de aplicación si este se afloja.



Inserción 12

Retire el papel del tubo. Siga las instrucciones de uso del fabricante de la bomba para conectar el tubo del set de infusión al depósito y a la bomba.

Inserción



Inserción 13

Retire la tapa protectora circular del conector apretando suavemente los lados y luego tirando de ella. Conserve la tapa para usarla más adelante.



Inserción 14

Sujete el set de infusión con la aguja hacia abajo. Purgue el set de infusión según las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la bomba hasta que la insulina salga por la aguja. Asegúrese de que no haya burbujas de aire en el tubo.


⚠ Precaución

Nunca llene el tubo mientras el set de infusión esté conectado a su cuerpo.



Inserción 15

Para conectar el conector a la carcasa de la cánula, coloque un dedo sobre el apósito mientras empuja el conector hacia dentro hasta oír un "clik". Revise con frecuencia la zona de inserción para asegurarse de que la cánula blanda permanezca en su lugar y que no presente irritación. Cambie el producto y la zona de aplicación si es necesario. Recuerde guardar las tapas para su uso posterior.

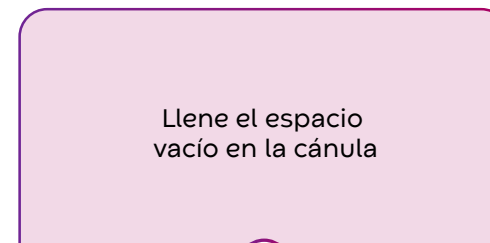

Inserción 16

Llene el espacio vacío en la cánula

Llene el espacio vacío en la cánula siguiendo las instrucciones del fabricante de la bomba.

⚠ Precaución

Revise siempre su nivel de glucosa en sangre entre 1 y 3 horas después de la inserción para garantizar que el set de infusión funcione correctamente. Mida su glucosa regularmente y consulte con su profesional de salud.

Guía de flechas



Tirar



Empujar



Indicar



Girar


Desconectando



Desconectando

A

Este set de infusión le permite desconectarse temporalmente de la bomba. Coloque un dedo justo delante de la carcasa de la cánula presione suavemente los lados del conector y tire hacia fuera.

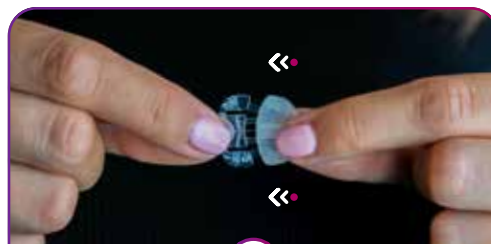

Desconectando

B

Coloque la tapa protectora circular en el conector.



Desconectando

C

Inserte la tapa protectora de desconexión en la carcasa de la cánula hasta que escuche un "clic".

Guía de flechas



Tirar



Empujar



Indicar



Girar


Reconectando



Reconectando

D

Retire la tapa de desconexión colocando un dedo sobre la carcasa de la cánula presione suavemente los lados del conector y tire hacia fuera.

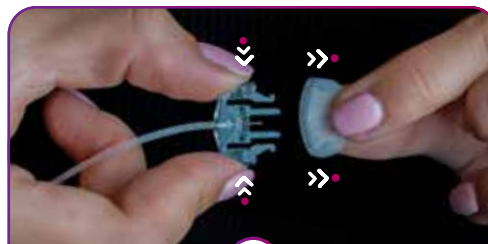

Reconectando

E

Retire la tapa protectora de la carcasa de la cánula presionando suavemente los lados del conector y, a continuación, tire de la tapa para retirarla.



Reconectando

F

Sujete el set de infusión con la aguja hacia abajo. Prepare el set de infusión según las instrucciones de uso del fabricante de la bomba hasta que la insulina salga por la aguja. Asegúrese de que no haya burbujas de aire en el tubo.

⚠ Precaución

Nunca llene el tubo mientras el set de infusión esté conectado a su cuerpo.



Reconectando

G

Para reconectar el conector a la carcasa de la cánula, coloque un dedo sobre esta mientras empuja el conector hacia dentro hasta que escuche un "clic".