



Guide des flèches



Tirer



Pousser



Pointer



Dérouler


Préparation

Avant de commencer

Préparation

1


Avant de suivre les étapes décrites dans ce guide d'utilisation, veuillez lire attentivement les informations et les avertissements figurant au bas de la dernière page. Veuillez noter que les informations fournies dans ce guide ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de santé ni la lecture des instructions d'emploi fournies avec le dispositif de perfusion.

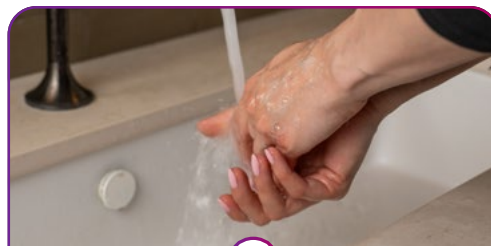

Préparation

2

Lavez-vous les mains avant d'insérer le dispositif de perfusion.

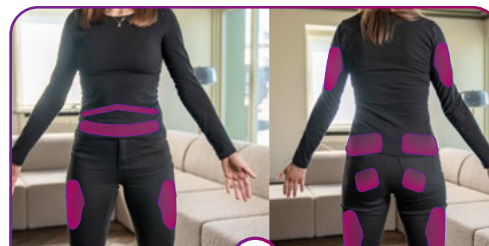

Préparation

3

Choisissez un site d'insertion selon les recommandations de votre professionnel de santé. N'utilisez pas la zone située juste à côté de votre ancien site de perfusion.




Préparation

4

Nettoyez la zone d'insertion avec un désinfectant, selon les instructions de votre professionnel de santé. Assurez-vous que la zone a bien séché à l'air libre avant d'insérer le dispositif de perfusion.

Insertion

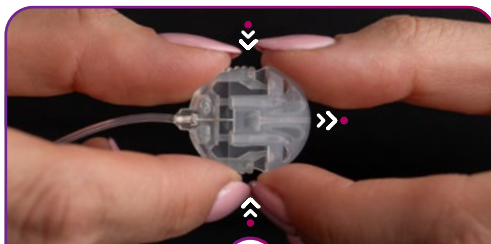


Insertion

5

Retirez le dispositif de perfusion de son emballage stérile. Retirez le papier de la tubulure et le capuchon protecteur circulaire de l'aiguille de connexion en pressant doucement les côtés de l'aiguille de connexion et en retirant le capuchon protecteur.

⚠ Attention

Assurez-vous de la stérilité du dispositif en vérifiant l'intégrité de l'emballage. Ne pas utiliser si le dispositif de perfusion est déjà ouvert ou endommagé.

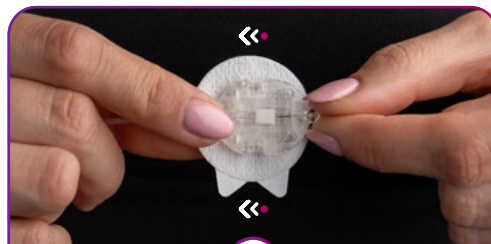

Insertion

6

Pour connecter l'aiguille du connecteur au boîtier de canule, maintenez l'aiguille du connecteur à l'endroit où elle se connecte au tube et insérez-la dans le boîtier de canule jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

📌 Conseil

L'aiguille du connecteur ne peut être insérée que d'un seul côté. Si vous sentez une résistance lors de l'insertion, retournez-la pour l'insérer facilement.



Insertion

7

Suivez les instructions d'utilisation du fabricant de votre pompe pour connecter la tubulure du dispositif de perfusion au réservoir de la pompe et à la pompe.



Insertion

8

Saisissez les ailettes de maintien du dispositif de perfusion et retirez délicatement le film protecteur du ruban adhésif. Évitez de toucher le ruban adhésif lorsque vous retirez le film protecteur.



Guide des flèches



Tirer



Pousser




Pointer



Dérouler

Insertion

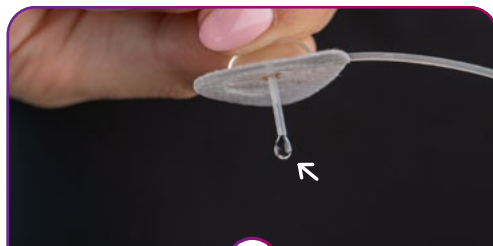


Insertion

9

Tenez le dispositif de perfusion, aiguille pointée vers le bas. Amorcez le dispositif conformément aux instructions du fabricant de la pompe jusqu'à ce que l'insuline sorte de l'aiguille. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de bulles d'air dans la tubulure.

⚠ Attention

Ne remplissez jamais la tubulure lorsque le dispositif de perfusion est connecté à votre corps.

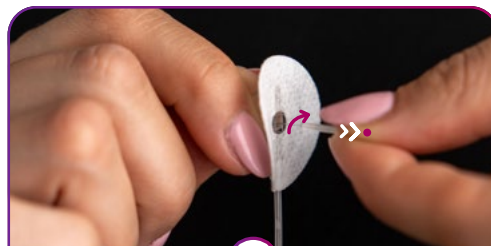


Insertion

10

Retirez le capuchon de l'aiguille en le tournant doucement puis en le tirant avec précaution. Évitez de toucher le ruban adhésif lors du retrait du capuchon de l'aiguille.

🚩 Conseil

N'oubliez pas de tourner le capuchon de l'aiguille avant de le retirer, car cela permet de le retirer en douceur.

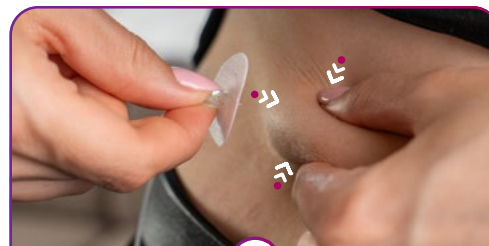

Insertion

11

Pincez la peau au point d'insertion d'une main. De l'autre, insérez le dispositif de perfusion à un angle de 90°.



Insertion

12

Massez doucement le ruban adhésif sur la peau.

Insertion



Insertion

13

Retirez le papier du ruban adhésif sur le boîtier de canule.



Insertion

14

Fixez le boîtier de canule sur votre peau à un endroit permettant une déconnexion facile. Massez délicatement le ruban adhésif sur la peau.

🚩 Conseil

Assurez-vous que la partie courte de la tubulure entre l'aiguille et le boîtier de canule n'est pas trop tendue.



Guide des flèches



Tirer



Pousser




Pointer



Dérouler

Déconnexion

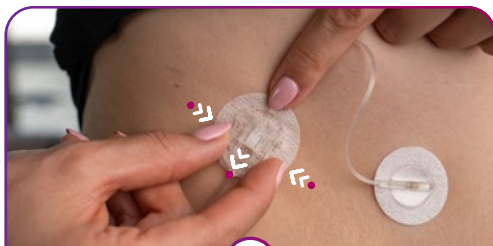


Déconnexion

A

Ce dispositif de perfusion vous permet de déconnecter temporairement votre pompe sans avoir à le changer. Déconnectez l'aiguille du connecteur du boîtier de canule en appuyant doucement sur les côtés du connecteur et en tirant l'aiguille vers l'extérieur.

Conseil


Placez votre doigt devant le boîtier de canule lors de la déconnexion pour maintenir l'adhésif en place.

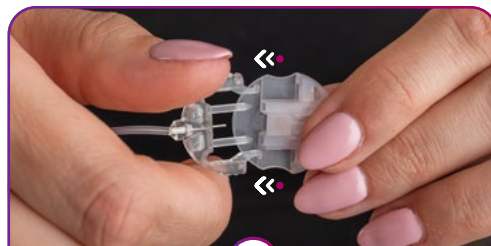

Déconnexion

B

Connectez le capuchon protecteur circulaire à l'aiguille du connecteur.

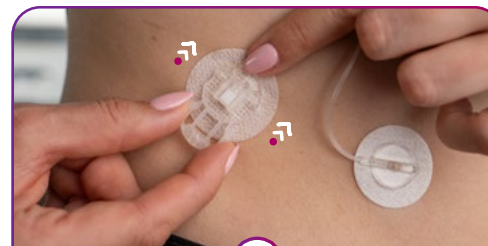

Déconnexion

C

Connectez le couvercle de déconnexion au boîtier de canule.

Guide des flèches



Tirer



Pousser




Pointer



Dérouler


Reconnexion

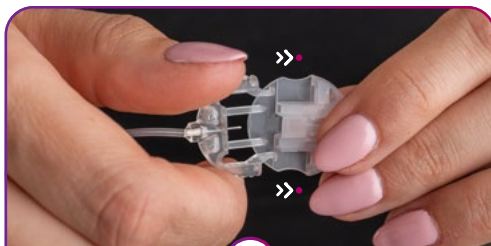

Reconnexion

D

Avant de reconnecter le dispositif de perfusion, assurez-vous que l'adhésif est toujours bien en place sur la peau. Retirez le capuchon de protection circulaire de l'aiguille de connexion.

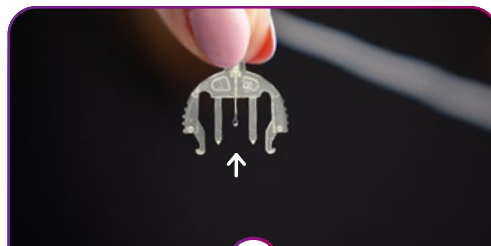


Reconnexion

E

Tenez le dispositif de perfusion, aiguille pointée vers le bas. Amorcez le dispositif conformément aux instructions du fabricant de la pompe jusqu'à ce que l'insuline sorte de l'aiguille. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de bulles d'air dans la tubulure.

⚠ Attention


Ne remplissez jamais la tubulure lorsque le dispositif de perfusion est connecté à votre corps.

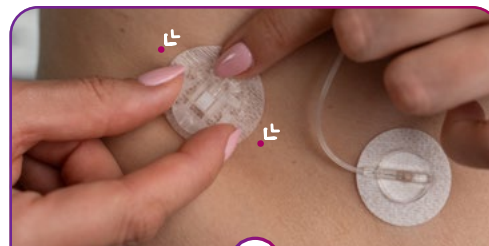

Reconnexion

F

Retirez le couvercle de déconnexion du boîtier de canule.

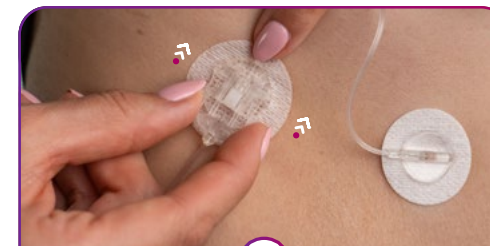

Reconnexion

G

Placez un doigt devant le boîtier de canule et poussez l'aiguille du connecteur directement jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

📌 Conseil

L'aiguille du connecteur ne peut être insérée que dans une seule position, avec un côté orienté vers le haut. Si vous rencontrez une résistance lors de l'insertion, tournez-le et réessayez.