

Pfeillegende



Ziehen



Drücken



Zeigen



Drehen


Vorbereitung

Bevor Sie beginnen

Vorbereitung

1


Bevor Sie die in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Schritte ausführen, lesen Sie bitte die Informationen und Disclaimer unten auf der letzten Seite sorgfältig durch. Bitte beachten Sie, dass die Informationen in dieser Anleitung keinen Ersatz für ärztlichen Rat oder das Lesen der dem Infusionsset beiliegenden Produkthanleitung darstellen.

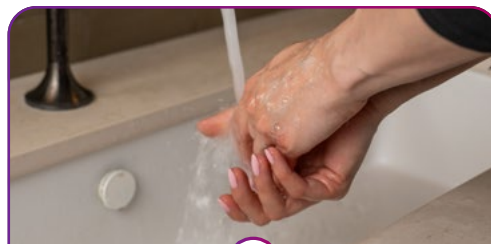

Vorbereitung

2

Waschen Sie Ihre Hände, bevor Sie das Infusionsset einsetzen.

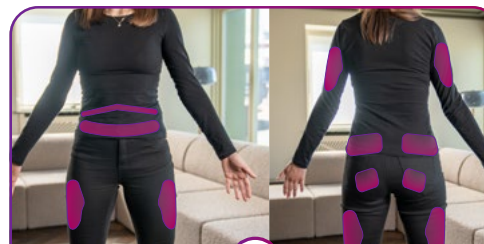

Vorbereitung

3

Wählen Sie die Einstichstelle entsprechend den Empfehlungen Ihres Arztes. Vermeiden Sie dabei Bereiche, die sich direkt neben der vorherigen Infusionsstelle befinden.




Vorbereitung

4

Reinigen Sie die Einstichstelle mit einem Desinfektionsmittel gemäß den Anweisungen Ihres Arztes. Achten Sie darauf, dass der Bereich vollständig luftgetrocknet ist, bevor Sie das Infusionsset einsetzen.

Einsetzen

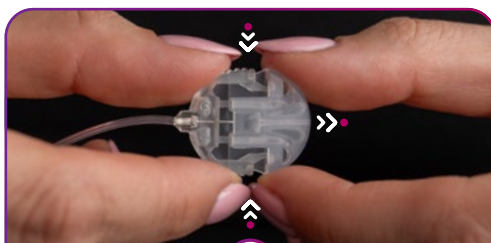


Einsetzen

5

Nehmen Sie das Infusionsset aus der sterilen Verpackung. Entfernen Sie das Papier vom Schlauch und die runde Schutzkappe vom Kupplungsteil, indem Sie die Seiten des Kupplungsteils leicht zusammendrücken und die Schutzkappe abziehen.

Vorsicht

Stellen Sie die Sterilität sicher, indem Sie die Verpackung auf Unversehrtheit prüfen. Verwenden Sie das Infusionsset nicht, wenn die Verpackung bereits geöffnet oder beschädigt ist.

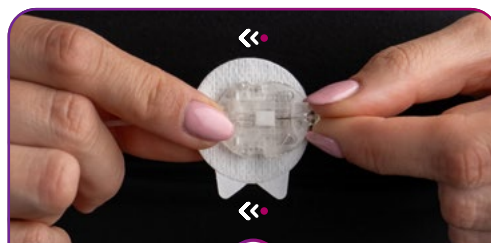

Einsetzen

6

Um das Kupplungsteil mit dem Kupplungsgehäuse zu verbinden, halten Sie es an der Stelle, an der es mit dem Schlauch verbunden ist, und führen Sie es in das Kupplungsgehäuse ein, bis ein deutliches „Klick“-Geräusch zu hören ist.

Tipp

Das Kupplungsteil lässt sich nur mit der einen Seite nach oben einführen. Wenn Sie beim Einführen einen Widerstand spüren, drehen Sie es um, um das Einführen zu erleichtern.



Einsetzen

7

Befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen Ihres Pumpenherstellers, um den Schlauch des Infusionssets mit dem Pumpenreservoir und der Pumpe zu verbinden.



Einsetzen

8

Greifen Sie die Halteflügel des Infusionssets und ziehen Sie das Schutzpapier vorsichtig vom Pflaster. Vermeiden Sie es, das Pflaster beim Abziehen des Schutzpapiers zu berühren.



Pfeillegende



Ziehen



Drücken




Zeigen



Drehen

Einsetzen

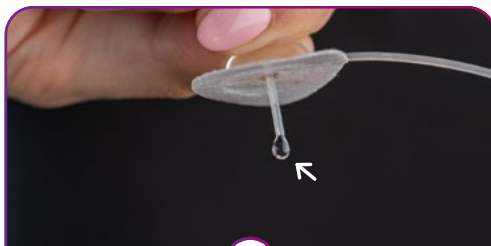


Einsetzen

9

Halten Sie das Infusionsset mit der Nadel nach unten. Füllen Sie das Infusionsset gemäß der Gebrauchsanweisung des Pumpenherstellers, bis Insulin aus der Nadel austritt. Stellen Sie sicher, dass sich keine Luftblasen im Schlauch befinden.

⚠ Vorsicht

Füllen Sie den Schlauch niemals, während das Infusionsset mit Ihrem Körper verbunden ist.

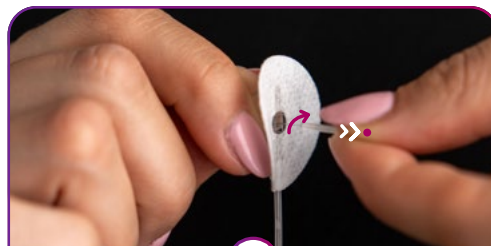


Einsetzen

10

Entfernen Sie den Nadelschutz, indem Sie ihn leicht drehen und dann vorsichtig abziehen. Berühren Sie beim Entfernen des Nadelschutzes nicht das Pflaster.

📌 Tipp

Vergessen Sie nicht, den Nadelschutz vor dem Abziehen zu drehen, da dies das Entfernen erleichtert.

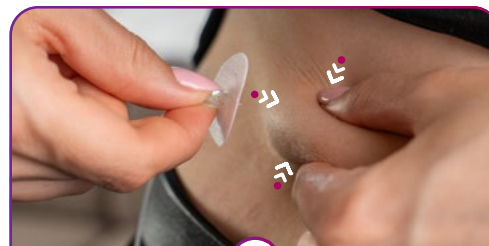

Einsetzen

11

Drücken Sie mit einer Hand die Haut an der Einstichstelle zusammen. Führen Sie mit der anderen Hand das Infusionsset in einem 90-Grad-Winkel ein.



Einsetzen

12

Massieren Sie das Pflaster sanft auf die Haut.

Einsetzen



Einsetzen

13

Entfernen Sie das Schutzpapier vom Pflaster am Kupplungsgehäuse.



Einsetzen

14

Befestigen Sie das Kupplungsgehäuse an einer Stelle auf Ihrer Haut, die ein einfaches Trennen ermöglicht. Massieren Sie das Pflaster sanft auf die Haut.

📌 Tipp

Achten Sie darauf, dass der kurze Schlauch zwischen Infusionsstelle und Kupplungsgehäuse nicht zu straff sitzt.



Pfeillegende



Ziehen



Drücken




Zeigen



Drehen

Trennen

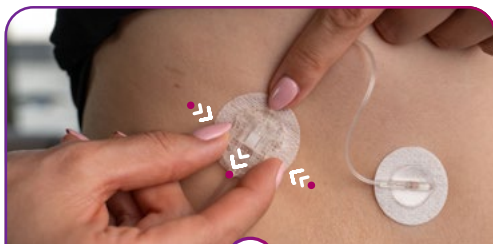


Trennen

A

Mit diesem Infusionsset können Sie Ihre Verbindung zur Pumpe vorübergehend trennen, ohne das Infusionsset wechseln zu müssen. Trennen Sie das Kupplungsteil vom Kupplungsgehäuse, indem Sie leicht auf die Seiten des Kupplungsteils drücken und es gerade herausziehen.

Tipp


Platzieren Sie Ihre Finger vor dem Kupplungsgehäuse, um das Pflaster beim Trennen in Position zu halten.

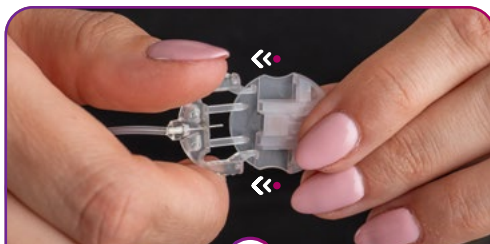

Trennen

B

Verbinden Sie die runde Schutzkappe mit dem Kupplungsteil.

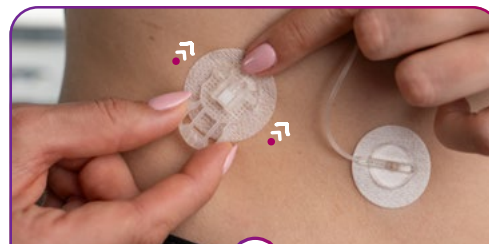

Trennen

C

Verbinden Sie die Trennabdeckung mit dem Kupplungsgehäuse.



Pfeillegende



Ziehen



Drücken




Zeigen



Drehen


Wiederverbinden

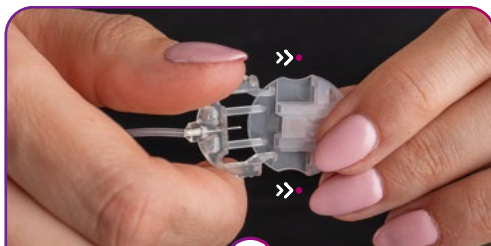

Wiederverbinden

D

Bevor Sie das Infusionsset wieder anschließen, vergewissern Sie sich, dass das Pflaster noch sicher auf der Haut sitzt. Entfernen Sie die runde Schutzkappe vom Kupplungsteil.

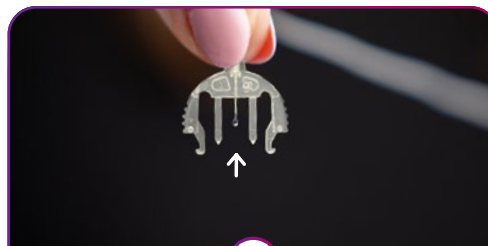


Wiederverbinden

E

Halten Sie das Infusionsset mit der Nadel nach unten. Füllen Sie das Infusionsset gemäß der Gebrauchsanweisung des Pumpenherstellers, bis Insulin aus der Nadel austritt. Stellen Sie sicher, dass sich keine Luftblasen im Schlauch befinden.

⚠ Vorsicht


Füllen Sie den Schlauch niemals, während das Infusionsset mit Ihrem Körper verbunden ist.

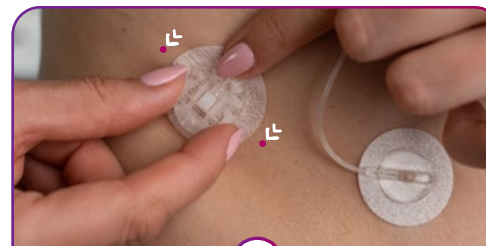

Wiederverbinden

F

Entfernen Sie die Trennabdeckung vom Kupplungsgehäuse.

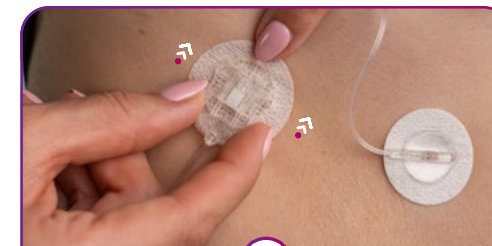

Wiederverbinden

G

Platzieren Sie einen Finger vor dem Kupplungsgehäuse und führen Sie das Kupplungsteil gerade ein, bis Sie ein „Klick“ hören.

📌 Tipp

Das Kupplungsteil lässt sich nur mit der einen Seite nach oben einführen. Wenn Sie beim Einführen einen Widerstand spüren, drehen Sie das Kupplungsteil um, um das Einführen zu erleichtern.