



Guida della freccia



Tirare



Spingere



Punto



Ruotare


Preparazione

Prima di iniziare

Preparazione

1


Prima di seguire le istruzioni descritte in questo manuale, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate in fondo all'ultima pagina. Si prega di notare che le informazioni fornite in questo manuale non sostituiscono il parere di un medico o la lettura delle istruzioni per l'uso (IFU) fornite con il set di infusione.

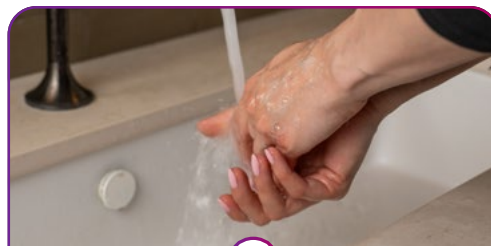

Preparazione

2

Lavarsi le mani prima di inserire il set di infusione.

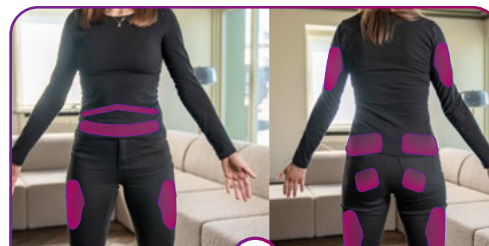

Preparazione

3

Scegliere il sito di inserimento raccomandato dal medico. Non utilizzare un'area adiacente al sito di infusione precedente.




Preparazione

4

Pulire la zona di inserimento con un disinfettante, come indicato dal medico. Assicurarsi che la zona sia asciutta all'aria prima di inserire il set di infusione.

Inserimento

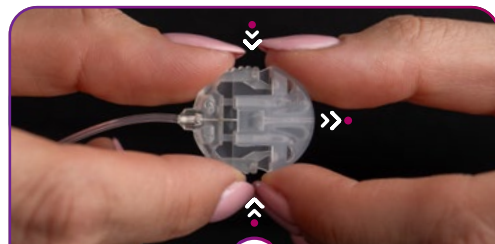


Inserimento

5

Estrarre il set di infusione dalla confezione sterile. Rimuovere la carta dal tubo e il cappuccio protettivo circolare dall'ago connettore, premendo delicatamente i lati dell'ago connettore e tirando via il cappuccio protettivo.

⚠ Attenzione

Assicurare la sterilità controllando che la confezione sia integra. Non utilizzare se il set di infusione è già aperto o danneggiato.

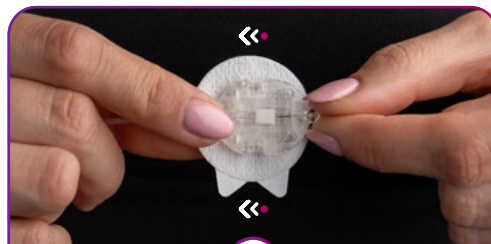

Inserimento

6

Per collegare l'ago di collegamento all'alloggiamento di accoppiamento, tenere l'ago di collegamento nel punto in cui si unisce al tubo e inserirlo nell'alloggiamento di accoppiamento finché non si sente un "clic".

💡 Suggerimento

L'ago di collegamento può essere inserito solo con il lato rivolto verso l'alto. Se si avverte resistenza durante l'inserimento, ruotare l'ago di collegamento per inserirlo più facilmente.



Inserimento

7

Seguire le istruzioni per l'uso fornite dal produttore della pompa per collegare il tubo del set di infusione al serbatoio della pompa e alla pompa.



Inserimento

8

Afferrare le alette di fissaggio del set di infusione e rimuovere con cautela la carta protettiva dal nastro adesivo. Evitare di toccare il nastro adesivo durante la rimozione della carta protettiva.



Guida della freccia



Tirare



Spingere




Punto



Ruotare

Inserimento

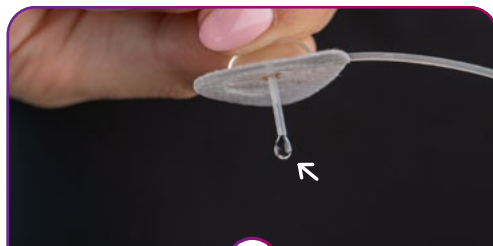


Inserimento

9

Tenere il set di infusione con l'ago rivolto verso il basso. Caricare il set di infusione secondo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore della pompa fino a quando l'insulina non fuoriesce dall'ago. Assicurarsi che non vi siano bolle d'aria nel tubo.

Attenzione

Non riempire mai il tubo mentre il set di infusione è collegato al corpo.

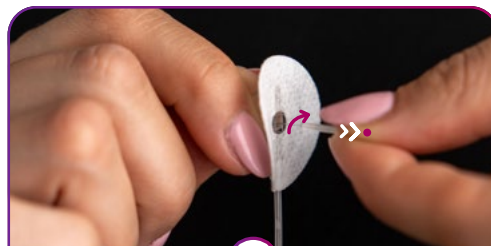


Inserimento

10

Rimuovere la protezione dell'ago ruotandola delicatamente e tirandola con cautela. Evitare di toccare il nastro adesivo quando si rimuove la protezione dell'ago.

Suggerimento

Non dimenticare di ruotare la protezione dell'ago prima di rimuoverla, poiché ciò aiuta a rimuoverla delicatamente.

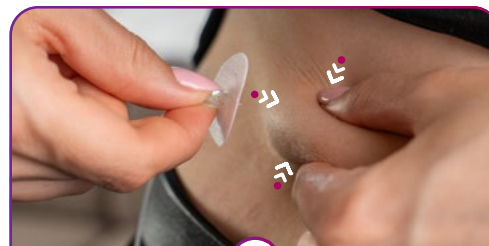

Inserimento

11

Con una mano, pizzicare la pelle nel sito di inserimento. Con l'altra mano, inserire il set di infusione con un angolo di 90 gradi.



Inserimento

12

Massaggiare delicatamente il nastro adesivo sulla pelle.

Inserimento



Inserimento

13

Rimuovere la carta dal nastro adesivo sull'alloggiamento di accoppiamento.



Inserimento

14

Fissare l'alloggiamento del connettore sulla pelle in un punto che ne consenta la facile disconnessione. Massaggiare delicatamente il nastro adesivo sulla pelle.

Suggerimento

Assicurarsi che la parte corta del tubo tra l'ago e l'alloggiamento di accoppiamento non sia troppo stretta.



Guida della freccia



Tirare



Spingere




Punto



Ruotare

Disconnessione

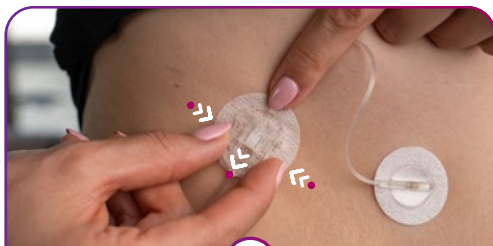


Disconnessione

A

Questo set di infusione consente di scollegare temporaneamente la pompa senza dover sostituire il set. Scollegare l'ago di collegamento dall'alloggiamento del raccordo premendo delicatamente i lati del connettore ed estraendo l'ago in linea retta.

Suggerimento


Posizionare un dito davanti all'alloggiamento di accoppiamento durante la disconnessione per mantenere l'adesivo in posizione.

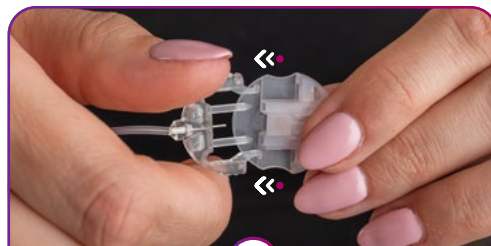

Disconnessione

B

Collegare il cappuccio protettivo circolare all'ago connettore.

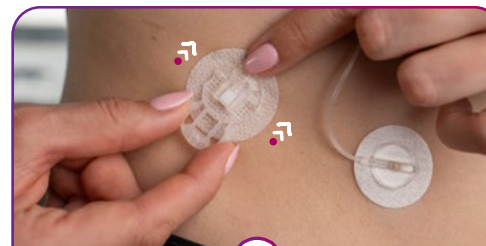

Disconnessione

C

Collegare il cappuccio di scollegamento all'alloggiamento di accoppiamento.



Guida della freccia



Tirare



Spingere




Punto



Ruotare


Riconnessione

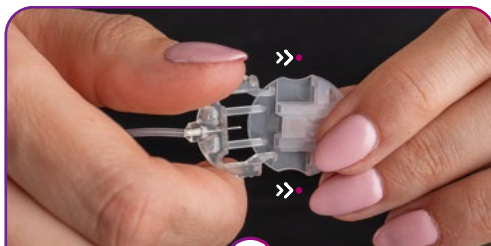

Riconnessione

D

Prima di ricollegare il set di infusione, assicurarsi che l'adesivo sia ancora ben aderente alla pelle. Rimuovere il cappuccio protettivo circolare dall'ago di collegamento.

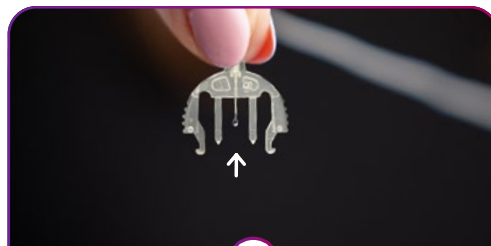


Riconnessione

E

Tenere il set di infusione con l'ago rivolto verso il basso. Caricare il set di infusione secondo le istruzioni per l'uso del produttore della pompa fino a quando l'insulina non fuoriesce dall'ago. Assicurarsi che non vi siano bolle d'aria nel tubo.

⚠ Attenzione


Non riempire mai il tubo mentre il set di infusione è collegato al corpo.

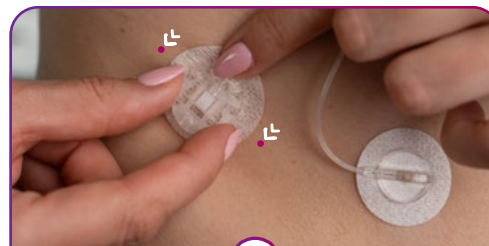

Riconnessione

F

Rimuovere il cappuccio di scollegamento dall'alloggiamento di accoppiamento.

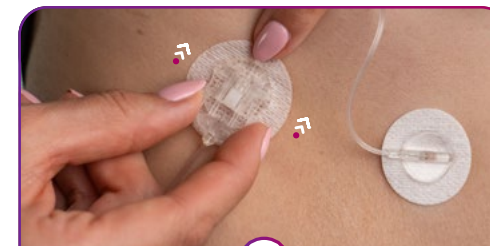

Riconnessione

G

Posizionare un dito davanti all'alloggiamento di accoppiamento e spingere l'ago di collegamento dritto fino a sentire un "clic".

📌 Suggerimento

L'ago di collegamento può essere inserito solo con il lato rivolto verso l'alto. Se si avverte resistenza durante l'inserimento, ruotare l'ago di collegamento per inserirlo più facilmente.