

Guía de flechas



Tirar



Empujar



Indicar



Girar

Preparación

Antes de empezar

Preparación

1

Antes de seguir los pasos descritos en esta guía, lea atentamente la información y las advertencias que se encuentran al final de la última página. Tenga en cuenta que la información proporcionada en esta guía no sustituye el consejo médico profesional ni la lectura de las instrucciones de uso (IFU) que vienen con el set de infusión.



Preparación

2

Lávese las manos antes de insertar el set de infusión.



Preparación

3

Elija el punto de inserción según las recomendaciones de su profesional de la salud. No utilice un área inmediatamente adyacente al punto de infusión anterior.



Preparación

4

Limpie la zona de inserción con un desinfectante según las indicaciones de su profesional sanitario. Asegúrese de que la zona se haya secado al aire antes de insertar el set de infusión.

Inserción




Inserción

5

Saque el set de infusión del embalaje estéril. Retire el papel del tubo y la tapa protectora circular del conector. Para ello, presione suavemente los lados del conector y retire la tapa.

Precaución

Asegúrese de que el embalaje esté intacto para garantizar la esterilidad. No lo utilice si el set de infusión ya está abierto o presenta daños.

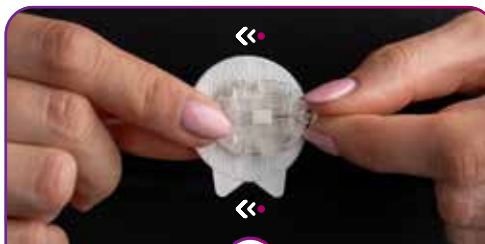

Inserción

6

Para conectar el conector a la carcasa de la cánula, sujételo por la zona donde se conecta al tubo e insértelo en la carcasa de la cánula hasta que escuche un «clic».

Consejo

El conector solo se puede insertar con un lado hacia arriba. Si nota resistencia durante la inserción, gire el conector para insertarlo fácilmente.



Inserción

7

Siga las instrucciones de uso del fabricante de la bomba para conectar el conector de la bomba del set de infusión al depósito de la bomba y a la bomba.



Inserción

8

Sujete las aletas del set de infusión y retire con cuidado el papel protector del apósito, evitando tocar este al retirarlo.

Guía de flechas



Tirar



Empujar




Indicar



Girar

Inserción

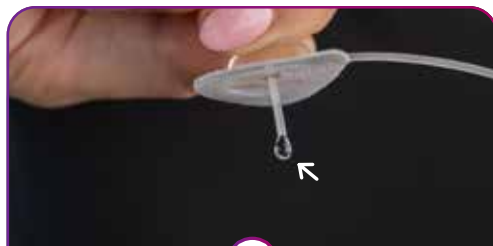

Inserción

9

Sujete el set de infusión con la aguja hacia abajo. Purgue el set de infusión según las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la bomba hasta que la insulina salga por la aguja. Asegúrese de que no haya burbujas de aire en el tubo.

⚠ Precaución

Nunca llene el tubo mientras el set de infusión esté conectado a su cuerpo.



Inserción

10

Retire el protector de la aguja girándolo suavemente y luego tirando de él con cuidado. Evite tocar el apósito al retirarlo.

📌 Consejo

No deje de girar el protector de la aguja antes de sacarlo, ya que esto ayuda a retirarlo con cuidado.



Inserción

11

Con una mano, presione la piel en el punto de inserción. Con la otra, inserte el set de infusión en un ángulo de 90 grados.



Inserción

12

Masajee suavemente el apósito sobre la piel.

Inserción



Inserción

13

Retire el papel del apósito de la carcasa de acoplamiento.



Inserción

14

Coloque la carcasa de acoplamiento sobre la piel en un lugar que permita desconectarla fácilmente. Masajee suavemente el apósito sobre la piel.

📌 Consejo

Asegúrese de que el tramo corto del tubo entre la aguja y la carcasa de acoplamiento no esté demasiado tensa.

Guía de flechas



Tirar



Empujar



Indicar



Girar

Desconectando



Desconectando

A

Este set de infusión le permite desconectarse temporalmente de la bomba sin tener que cambiarla. Desconecte el conector de la carcasa de acoplamiento presionando suavemente los lados del conector y tirando de la aguja hacia fuera.

Consejo


Coloque el dedo delante de la carcasa de acoplamiento al desconectarlo para mantener el adhesivo en su lugar.



Desconectando

B

Conecte la tapa protectora circular al conector.

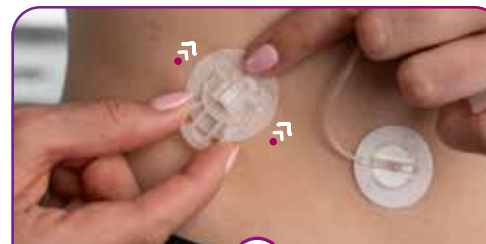

Desconectando

C

Conecte la tapa protectora de desconexión a la carcasa de acoplamiento.



Guía de flechas



Tirar



Empujar



Indicar



Girar


Reconectando



Reconectando

D

Antes de reconectar el set de infusión, asegúrese de que el adhesivo siga firmemente adherido a la piel. Retire la tapa protectora circular del conector.

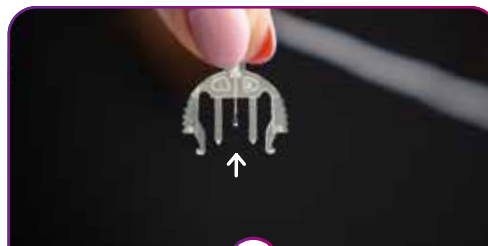

Reconectando

E

Sujete el set de infusión con la aguja hacia abajo. Purgue el set de infusión según las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la bomba hasta que la insulina salga por la aguja. Asegúrese de que no haya burbujas de aire en el tubo.

⚠ Precaución


Nunca llene el tubo mientras el set de infusión esté conectado a su cuerpo.



Reconectando

F

Retire la tapa protectora de desconexión de la carcasa de acoplamiento.

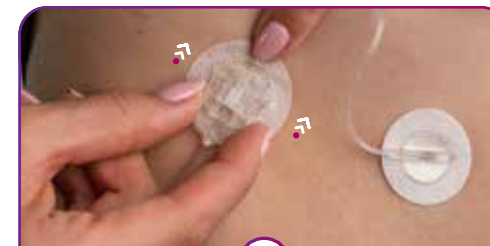

Reconectando

G

Coloque un dedo delante de la carcasa de acoplamiento y empuje el conector hacia adentro hasta que escuche un "clic".

📌 Consejo

El conector solo puede insertarse en una posición, con un lado orientado hacia arriba. Si encuentra resistencia al insertarlo, gírelo y vuelva a intentarlo.