



Guide des flèches



Tirer



Pousser



Pointer



Dérouler


Préparation

Avant de commencer

Préparation

1


Avant de suivre les étapes décrites dans ce guide d'utilisation, veuillez lire attentivement les informations et les avertissements figurant au bas de la dernière page. Veuillez noter que les informations fournies dans ce guide ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de santé ni la lecture des instructions d'emploi fournies avec le dispositif de perfusion.

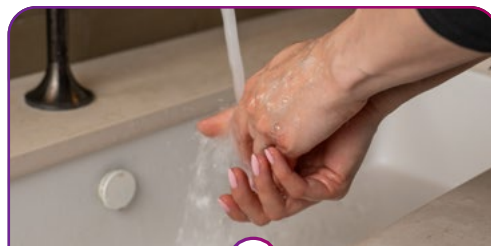

Préparation

2

Lavez-vous les mains avant d'insérer le dispositif de perfusion.

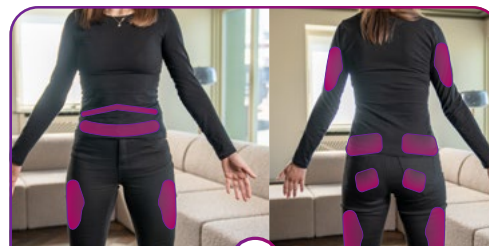

Préparation

3

Choisissez un site d'insertion selon les recommandations de votre professionnel de santé. N'utilisez pas la zone située juste à côté de votre ancien site de perfusion.



Préparation

4

Nettoyez la zone d'insertion avec un désinfectant, selon les instructions de votre professionnel de santé. Assurez-vous que la zone a bien séché à l'air libre avant d'insérer le dispositif de perfusion.

Insertion



Insertion

5

Tirez sur la bande rouge pour retirer le plastique de scellement.

⚠ Attention


Assurez-vous de la stérilité du dispositif en vérifiant l'intégrité du papier stérile et du plastique de scellement. Ne pas utiliser si le dispositif de perfusion est déjà ouvert ou a été endommagé.



Insertion

6

Retirez le papier stérile.

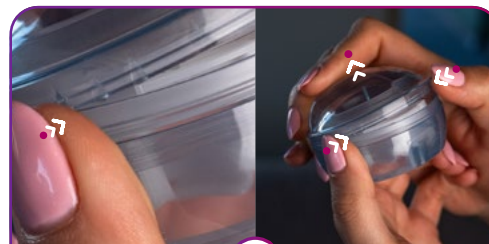

Insertion

7

Pour retirer le couvercle, appuyez fermement sur les trois points en relief de chaque côté du couvercle avec une main et soulevez le couvercle avec l'autre main.

⚠ Attention

Veuillez à ne pas plier ni toucher l'aiguille d'insertion lors de la préparation de l'inserteur et du dispositif de perfusion.



Insertion

8

Pour dérouler la tubulure, faites passer doucement le début de la tubulure par la fente. Ensuite, déroulez-la délicatement vers le haut.

⚠ Attention

Ne tirez pas trop fort lorsque la tubulure est complètement libérée pour éviter de soulever accidentellement le boîtier de canule du dispositif d'introduction.

Guide des flèches



Tirer



Pousser



Pointer



Dérourer

Insertion



Insertion 9

Suivez les instructions d'utilisation du fabricant de votre pompe pour connecter la tubulure du dispositif de perfusion au réservoir de la pompe et à la pompe.



Insertion 10

Amorcez le dispositif de perfusion conformément aux instructions du fabricant de la pompe jusqu'à ce que l'insuline soit libérée par l'aiguille. Assurez-vous qu'il n'y a pas de bulles d'air dans la tubulure.

⚠ Attention

Tenez le dispositif de perfusion avec l'aiguille pointée vers le bas pour éviter tout contact entre le médicament et le ruban adhésif. Ne remplissez jamais la tubulure lorsque le dispositif de perfusion est connecté à votre corps.



Insertion 11

Tirez doucement vers le haut pour retirer le papier support de l'adhésif.

📌 Conseil

Ne tirez pas trop fort pour éviter de soulever accidentellement le dispositif de perfusion de l'inserteur.




Insertion 12

Pour préparer l'inserteur, saisissez-le et appuyez légèrement sur les indentations rondes de chaque côté. Tirez sur le ressort jusqu'à entendre un « clic ».

📌 Conseil

Avant de tirer le ressort, assurez-vous que la tubulure pend librement sur le bord et n'est pas placée dans l'une des fentes ou bloquée par votre main car vous risqueriez de déloger le boîtier de canule de l'inserteur.

Insertion

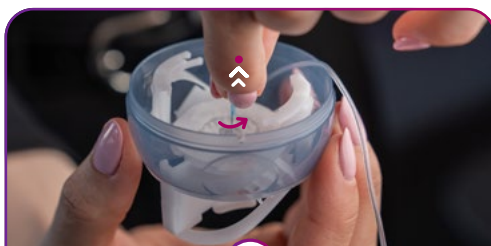

Insertion 13

Retirez le capuchon de l'aiguille en le tournant doucement puis en le tirant avec précaution. Évitez de toucher le ruban adhésif lors du retrait du capuchon de l'aiguille.

📌 Conseil

N'oubliez pas de tourner le capuchon de l'aiguille avant de le retirer, car cela permet de le retirer en douceur.



Insertion 14

Avant de positionner le dispositif de perfusion, placez la tubulure dans la fente la plus proche pour vous assurer qu'elle ne reste pas coincée sous l'inserteur lors de l'insertion.

📌 Conseil

Ne tirez pas trop fort lorsque vous placez la tubulure dans la fente pour éviter de déloger le dispositif de perfusion de l'inserteur.


⚠ Attention

Si le dispositif de perfusion n'est pas placé solidement dans l'inserteur avec l'aiguille pointée droit devant avant l'insertion, une douleur ou une blessure mineure peut survenir.



Insertion 15

Vérifiez que la canule souple se trouve sous la pointe de l'aiguille d'introduction. Ne sautez pas cette étape, car elle est essentielle pour garantir une insertion correcte.

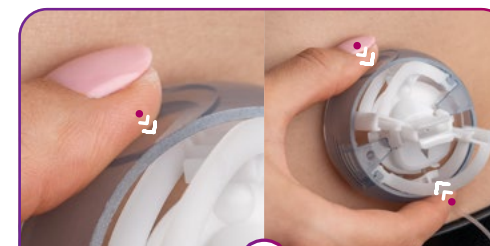

Insertion 16

Pour insérer le dispositif de perfusion, positionnez l'inserteur sur le site d'insertion et appuyez simultanément sur les indentations rondes de chaque côté de l'inserteur.

📌 Conseil

La forme triangulaire à l'intérieur de l'inserteur indique la direction vers laquelle la tubulure sera orientée après l'insertion.



Guide des flèches



Tirer



Pousser



Pointer



Dérouler

Insertion



Insertion

17


Appuyez doucement sur le centre de l'inserteur pour fixer l'adhésif sur la peau. Cela permet de garantir que votre dispositif de perfusion est bien fixé sur le corps lors du retrait de l'inserteur.



Insertion

18

Retirez l'inserteur et l'aiguille d'introduction en saisissant l'inserteur par le centre et en le tirant doucement vers l'arrière. Massez délicatement le ruban adhésif pour vous assurer qu'il est bien en place sur la peau.

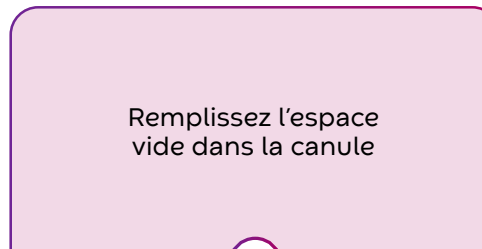

Insertion

19

Remplissez l'espace vide dans la canule en suivant les instructions du fabricant de votre pompe.

⚠ Prudence

Vérifiez toujours votre glycémie une à trois heures après l'insertion du dispositif de perfusion afin de vous assurer de son bon fonctionnement. Mesurez régulièrement votre glycémie. Discutez-en avec votre professionnel de santé.



Insertion

20

Pour fermer l'inserteur et le mettre au rebut en toute sécurité, remplacez le couvercle de l'inserteur jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

Déconnexion




Déconnexion

A

Ce dispositif de perfusion vous permet de déconnecter temporairement votre pompe sans avoir à changer de dispositif de perfusion.

Maintenez le ruban adhésif en place en plaçant un doigt juste devant le boîtier de canule et en pressant doucement les côtés du connecteur. Retirez l'aiguille du connecteur du boîtier de canule.

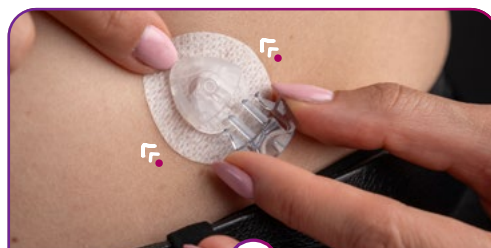

Déconnexion

B

Insérez le couvercle de déconnexion dans le boîtier de canule jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».



Guide des flèches



Tirer



Pousser




Pointer



Dérourer

Reconnexion

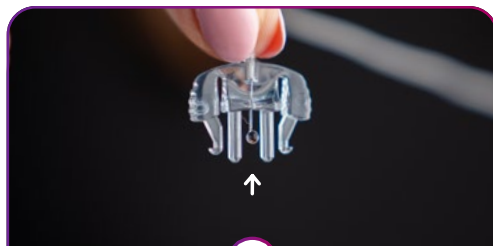

Reconnexion


C

Avant de reconnecter le kit de perfusion, assurez-vous que l'adhésif soit toujours bien fixé sur la peau.

Si nécessaire, amorcez le dispositif de perfusion jusqu'à ce que l'insuline soit distribuée par l'aiguille.

⚠ Attention

Lors de la préparation du dispositif de perfusion, tenez-le aiguille pointée vers le bas. Ne remplissez jamais la tubulure lorsque le dispositif de perfusion est connecté à votre corps.

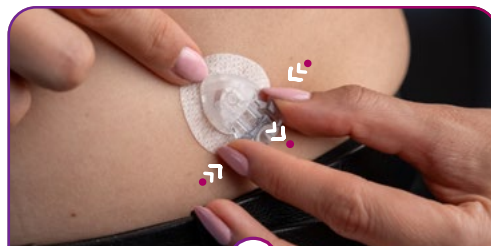

Reconnexion

D

Placez un doigt sur le ruban adhésif juste devant le boîtier de canule. Retirez le couvercle de déconnexion.



Reconnexion

E

Placez un doigt sur le ruban adhésif juste devant le boîtier de canule.

Poussez l'aiguille du connecteur directement jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».