

Guía de flechas



Tirar



Empujar



Indicar



Girar

Preparación

Antes de empezar

Preparación

1

Antes de seguir los pasos descritos en esta guía, lea atentamente la información y las advertencias que se encuentran al final de la última página. Tenga en cuenta que la información proporcionada en esta guía no sustituye el consejo médico profesional ni la lectura de las instrucciones de uso (IFU) que vienen con el set de infusión.



Preparación

2

Lávese las manos antes de insertar el set de infusión.



Preparación

3

Elija el punto de inserción según las recomendaciones de su profesional de la salud. No utilice un área inmediatamente adyacente al punto de infusión anterior.



Preparación

4

Limpie la zona de inserción con un desinfectante según las indicaciones de su profesional sanitario. Asegúrese de que la zona se haya secado al aire antes de insertar el set de infusión.

Inserción



Inserción

5

Tire de la cinta roja para retirar el sello de plástico estéril.

⚠ Precaución

Asegúrese de la esterilidad comprobando que el papel esterilizado y el sello de seguridad estén intactos. No utilice el set de infusión si está abierto o dañado.



Inserción

6

Retire el papel esterilizado.



Inserción

7

Para retirar la tapa, presione firmemente los tres puntos de presión a cada lado de la tapa con una mano y levántela con la otra.

⚠ Precaución

Tenga cuidado de no doblar ni tocar la cánula blanda introductora al preparar el insertador y el set de infusión.



Inserción

8

Para desenrollar el tubo, gire suavemente el extremo hasta liberarlo de la ranura. A continuación, desenrolle el tubo del insertador tirando suavemente hacia arriba.

⚠ Precaución

No tire con demasiada fuerza cuando el tubo esté completamente liberado para evitar levantar accidentalmente el set de infusión del insertador.

Guía de flechas



Tirar



Empujar



Indicar



Girar

Inserción



Inserción

9

Siga las instrucciones de uso del fabricante de la bomba para conectar el tubo del set de infusión al depósito de la bomba y a la bomba.



Inserción

10

Purgue el set de infusión según las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la bomba hasta que la insulina salga por la aguja. Asegúrese de que no haya burbujas de aire en el tubo.

⚠️ Precaución

Sujete el set de infusión con la aguja hacia abajo para evitar el contacto entre el medicamento y el papel adhesivo. Nunca llene el tubo con el set de infusión conectado a su cuerpo.




Inserción

11

Tire hacia arriba con cuidado para retirar el papel protector del adhesivo.

📌 Consejo

No tire con demasiada fuerza para evitar levantar accidentalmente el set de infusión del insertador.

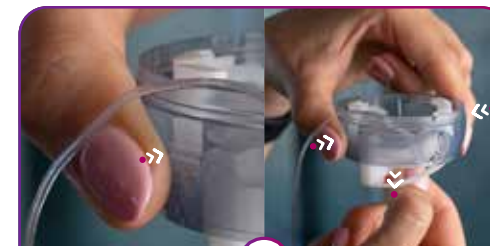

Inserción

12

Para preparar el insertador, sujete y presione ligeramente las hendiduras alineadas en ambos lados. Tire del resorte hasta escuchar un "clic".

📌 Consejo

Antes de tirar del resorte, asegúrese de que el tubo cuelgue libremente sobre el borde. No debe estar colocado en una ranura ni sujeto con la mano, ya que podría desprender el set de infusión del insertador.

Inserción



Inserción

13

Retire el protector de la aguja girándolo suavemente y luego tirando de él con cuidado. Evite tocar el apósito al retirarlo.

📌 Consejo

No deje de girar el protector de la aguja antes de sacarlo, ya que esto ayuda a retirarlo con cuidado.



Inserción

14

Antes de colocar el set de infusión, coloque el tubo en la ranura más cercana para asegurarse de que no quede atrapado debajo del insertador durante la inserción.

📌 Consejo

No tire con demasiada fuerza al colocar el tubo en la ranura para evitar que el set de infusión se desprenda del insertador.

⚠️ Precaución

Si, antes de la inserción, el set de infusión no está colocado de forma segura en el insertador, con la aguja apuntando hacia delante, podría causar dolor o una lesión leve.



Inserción

15

Compruebe que la cánula blanda esté por debajo de la punta de la aguja introductora. No omita este paso, ya que es fundamental para asegurar una inserción correcta.



Inserción

16

Para insertar el set de infusión, coloque el insertador sobre el punto de inserción y presione simultáneamente las hendiduras redondas a cada lado del insertador.

📌 Consejo

La forma triangular dentro del insertador apunta hacia la dirección en la que quedará el tubo después de la inserción.

Guía de flechas



Tirar



Empujar



Indicar



Girar

Inserción



Inserción

17

Presione suavemente el centro del insertador para fijar el adhesivo a la piel. Esto ayuda a garantizar que el set de infusión quede firmemente asentado al retirar el insertador.



Inserción

18

Retire la aguja de inserción e introducción sujetándola por el centro y tirando suavemente hacia atrás. Masajee suavemente el apósito para asegurarse de que se asiente correctamente sobre la piel.

Llene la cánula para eliminar el espacio vacío

Inserción

19

Llene el espacio vacío en la cánula siguiendo las instrucciones del fabricante de la bomba.

⚠ Precaución

Revise siempre su nivel de glucosa en sangre entre 1 y 3 horas después de la inserción para garantizar que el set de infusión funcione correctamente. Mida su glucosa regularmente y consulte con su profesional de salud.



Inserción

20

Para cerrar el insertador y desecharlo de forma segura, empuje la tapa hacia atrás hasta que escuche un "clic".

Desconectando



Desconectando

A

Este set de infusión le permite desconectar temporalmente su bomba sin tener que cambiarlo.

Sujete el apósito colocando un dedo justo delante de la carcasa de la cánula mientras presiona suavemente los lados del conector. Luego, extraiga la aguja del conector y del alojamiento de la cánula.



Desconectando

B

Inserte la tapa protectora de desconexión en la carcasa de la cánula hasta que escuche un "clic".



Guía de flechas



Tirar



Empujar




Indicar



Girar

Reconectando

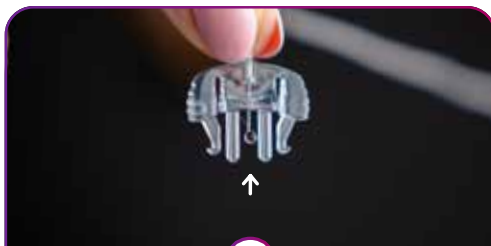

Reconectando

C

Antes de volver a conectar el set de infusión, asegúrese de que el adhesivo todavía esté firmemente asentado sobre la piel.

Si es necesario, purgue el set de infusión hasta que la insulina salga por la aguja.

⚠ Precaución

Sujete el set de infusión con la aguja hacia abajo. Purgue el set de infusión según las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la bomba hasta que la insulina salga por la aguja. Nunca llene el tubo mientras el set de infusión esté conectado a su cuerpo.



Reconectando

D

Coloque un dedo sobre el apósito justo delante de la carcasa de la cánula. Retire la tapa protectora de desconexión.



Reconectando

E

Coloque un dedo sobre el apósito justo delante de la carcasa de la cánula.

Empuje el conector directamente hasta que oiga un "clic".