



convatec

— forever caring —



**Accessori
da usare
ogni giorno**



INDICE

Pasta livellante	3
Polvere protettiva	4
Anello protettivo	5
Film protettivo	6
Rimuovi adesivo	7
Bustine gelificanti	8
Strisce idrocolloidali	9
Cintura addominale	10

Pasta Stomahesive®

Livella le irregolarità della cute intorno alla stomia migliorando l'adesione della placca



Come utilizzare la Pasta Stomahesive®

1. Distribuisci una quantità non superiore alle dimensioni di una nocciola su un dito inumidito.
2. Applica un sottile strato di pasta sulla zona da riempire fino ad ottenere una superficie uniforme. In caso di cute irritata, lascia evaporare l'alcool per qualche istante prima di procedere all'applicazione, altrimenti potresti avvertire un lieve bruciore.
3. Aspetta qualche istante prima di applicare il dispositivo.

PRODOTTO	CODICE	ISO 1999	ISO 2017
PASTA	7598	09.18.30.003	09.18.30.012

Polvere Stomahesive®

Protegge la pelle irritata assorbendo l'essudato e favorendo l'adesione del sistema di raccolta



Come utilizzare la Polvere Stomahesive®

1. Dopo aver pulito la cute, lasciandola umida, applica uno strato sottile di polvere, soffiando via quello in eccesso.
2. La polvere può essere utilizzata insieme alla pasta. In questo caso, applica prima la polvere.

PRODOTTO	CODICE	ISO
POLVERE	7595	09.18.30.006

Anello Stomahesive®

Sigilla il contorno della stomia, proteggendo la pelle dal contatto con gli effluenti



Come utilizzare l'Anello Stomahesive®

1. Modella, arrotola, tira o schiaccia delicatamente l'Anello intorno alla stomia. Per adattarlo alle zone più irregolari puoi tagliarlo e riattaccarlo, ripiegarlo su se stesso o sagomarlo a piacimento.
2. Applica l'Anello e avvicinalo delicatamente con le mani ai contorni della stomia.
3. Posiziona il dispositivo sopra l'Anello.
4. Tieni la mano sopra, premendo per circa 30 secondi, per accertarti che abbia aderito bene.



PRODOTTO	CODICE	ISO 1999	ISO 2017
ANELLO	413503	09.18.30.003	09.18.30.012

ESENTA™

Film protettivo

- Crea una barriera traspirante in silicone che protegge la cute fino a **72 ore**
- Riduce il rischio di irritazioni cutanee causate da contatto con effluenti e adesivi
- Sicuro ed efficace anche con un uso frequente



Rimborsato
dal S.S.N.

Come utilizzare ESENTA™ - Spray protettivo

1. Agita la bomboletta.
2. Applica lo spray in maniera uniforme sopra la cute mantenendo una distanza di circa 10 - 15 cm.
3. Attendi qualche istante fino a che la pelle sia asciutta.
4. Applica il nuovo sistema di raccolta.



Come utilizzare ESENTA™ - Salviette protettive

1. Passa la salvietta uniformemente sulla cute.
2. Attendi qualche istante fino a che la cute sia asciutta.
3. Applica il nuovo sistema di raccolta.



PRODOTTO	CODICE	ISO 1999	ISO 2017
SPRAY	423288	09.18.30.006	09.18.30.009
SALVIETTE	423282	09.18.30.006	09.18.30.009

ESENTA™

Rimuovi Adesivo

- Formula avanzata in silicone che rende la rimozione dell'adesivo facile e veloce
- Atraumatico, riduce le alterazioni da "strappo" del dispositivo dalla cute
- Delicato sulla pelle, lascia la cute liscia e setosa



Come utilizzare ESENTA™ - Spray

1. Applica lo spray dall'alto direttamente sulla placca da una distanza di circa 10 - 15 cm.
2. Dopo qualche istante la barriera si staccherà molto facilmente dalla pelle.



Come utilizzare ESENTA™ - Salviette

1. Dopo aver rimosso il dispositivo strofina la salvietta sulla pelle intorno alla stomia per rimuovere i residui di adesivo o di pasta.



PRODOTTO	CODICE	ISO 2017
SPRAY	423289	09.18.30.009
SALVIETTE	423281	09.18.30.009

Diamonds™

Bustine gelificanti anti-odore

Le bustine sono assorbenti, gelificano le feci liquide e ne catturano gli odori grazie alla tecnologia *ActivOne™* Odour Control



Come utilizzare Diamonds™

1. Inserisci una bustina nella sacca senza aprirla.
2. Una volta a contatto con i liquidi la bustina si rompe assorbendo e gelificando il contenuto della sacca.
3. Quando il contenuto della sacca si è gelificato puoi appiattirla per ottenere una elevata discrezione sotto gli abiti.
4. Svuota e smaltisci normalmente il contenuto della sacca, come di consueto.
5. Dopo lo svuotamento puoi inserire un'altra bustina dal fondo della sacca.



PRODOTTO	CODICE
DIAMONDS	TR 105

Ease™ Strips

Strisce idrocolloidalì

Sottili strisce idrocolloidalì che aiutano a mantenere adesa la placca alla cute e si adattano al tuo corpo, seguendone tutti i movimenti.



Possono anche essere adoperate per prevenire che i bordi della placca si attacchino ai vestiti, dopo aver nuotato o aver fatto il bagno.

Come utilizzare Ease™ Strips

1. Rimuovi la pellicola presente sulle strisce.
2. Le strisce vanno posizionate sopra i bordi della placca per circa 1,5-2 cm.
3. Le strisce vanno indossate fino a quando contribuiscono a mantenere la placca. In ogni caso, è consigliabile tenerle al massimo una settimana.



PRODOTTO	CODICE
EASE™ STRIPS SOTTILI	422160
EASE™ STRIPS CURVE	422164

Cintura addominale

Fornisce un ulteriore senso di sicurezza e di tenuta del dispositivo



Come utilizzare la Cintura addominale

1. Regolare la cintura e agganciarla negli appositi spazi presenti sulla sacca.

PRODOTTO	CODICE
CINTURA	6611

[illegible]



TM

**Un unico numero per essere
al tuo fianco ogni giorno**

800.930.930

Servizio me+ è a tua disposizione

al Numero verde gratuito dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00
o manda un'e-mail all'indirizzo

convatel.italia@convatec.com. Visita il sito **www.convatec.it**



WhatsApp 348 9412247



convatec
— forever caring —

®/TM Sono marchi registrati ConvaTec Inc
Dispositivi medici **CE**

Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso